


5V1 ELEGANTE 1893 kozmetikai gép

M-1893

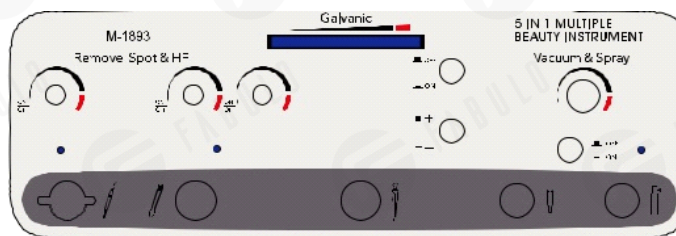

② A szívó- és permetezési műveleteket ismertetése

Cél: tápanyagbevétel a pórusokban lévő felesleges szennyeződések eltávolítása után

Bevezetés a működésbe	
Tartozékok	Két szórófejes flakon, 1 tapadókorong három különböző méretű tapadókoronggal, piros és fekete tömlővel.
Működési mód	1. A szívótoll csatlakozik a piros tömlőhöz. A szívóhatás a szívónyílás lenyomásával jön létre. Az egyes alkatrészekhez három eltérő méretű tapadókorongot használunk. 2. Csatlakoztassa a spray-t a fekete tömlőhöz, és a mutatóujjával nyomja meg a felső nyílást, hogy megtörténjen a kozmetikum porlasztása.
Biztonsági intézkedések	
<p>1. A bőrsérülések elkerülése érdekében ne tartsa hosszan a test egyazon részén. 2. A használt tartozékokat semleges mosószerrel mossa el, sterilizálja és tartsa szárazon. 3. Ne használjon viszkózus folyadékokat, különben könnyen dugulást okozhatnak. 4. A szívás és a permetezés sorrendjét nem lehet felcserélni, különben a légszivattyú megsérül. 5. Ne feledje a használt tömlő színét, hogy ne a szívótömlőt használja permetezésre, hogy a tömlőben lévő szennyeződés ne kerüljön az arcra.</p>	

3. Ismeretek a folteltávolítással kapcsolatban

Cél: a melanin lebontása

Bevezetés a működésbe	
Tartozékok	Folteltávolító toll
Működési mód	1) Kapcsolja be a főkapcsolót, így állítva enyhe üzemmódba az intenzitás-gombot, tesztelje, kap-e áramütést a levelekkel vagy a szappannal. 2) Távolítsa el a foltot vagy anyagjegyet: helyezze az elektroakupunktúrás tűt a pontra, és mozogjon vízszintesen. Látható, hogy a melanin feketévé válik és leesik, miután az elektroakupunktúrás tűt behelyezték. Egy kicsi és enyhe foltot azonnal el lehet távolítani, egyébként 2-3 alkalommal kell kezelni. 3. Az eljárás után ne érjen vízhez. Alkalmazzon gyulladáscsökkentő gyógyszert a sebre.
Alkalmazási terület	Chloasma, napégés, szeplők, öregségi foltok, tetoválások stb.

⑩ Az elektroterápia működésének ismerete

Cél: a bőrsebek gyógyulásának felgyorsítása az ózon sterilizálásával és a gyulladás csökkentésével a kiütésekkel vagy más problémákkal küzdő bőrön.

Bevezetés a működésbe	
Tartozékok	1 elektroterápiás pálca egy kígyó alakú, egy gomba alakú és egy hajlított üvegcsővel
Működési mód	1. Helyezze be a vezetéket a vezetéktartóba. 2. A kezelendő területtől függően helyezzen különböző alakú üvegcsöveket az elektroterápiás rúdba. 3. Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be az intenzitásszabályozót a működéshez. 4. Használat után először állítsa vissza az intenzitásgombot nullára, majd a készülék kikapcsolása után húzza ki az üvegcsövet.
Biztonsági intézkedések	1. Az UV üvegcsőnek mindig tisztának és száraznak kell lennie. 2. Az elektroterápia végzésekor nem szabad túl sokáig ugyanazon a helyen tartani, hogy elkerüljük a hegesevést. 3. Ne vegyen fel fém ékszereket a kezelés előtt.

⑪ Ismerkedés a galvanikus áramkezelés működésével

Cél: a szennyeződések eltávolítása és a bőr tisztítása; tápanyagok bevitele és a nedvesség pótlása.

Bevezetés a működésbe	
Tartozékok	Egy fogantyú a galvánáram-kezeléshez
Elvileg	Az azonos polaritású elektródák taszító és az ellentétes polaritású elektródák vonzó fizikai elvének alkalmazásával a szennyeződések a pórusokba exportálják, és az aktív ionos hatóanyagokat tartalmazó illóolajat/testápolót/krémet a pórusokon, verejtékmirigyeken és sejttereken keresztül a bőrbe nyomja (pozitív pólus az exporthoz, negatív pólus az importhoz).
Működési mód	Amikor a kulcskapcsoló a "+" állásba van fordítva, akkor exportálási állapotban van. Ha a kulcskapcsolót "-" állásba fordítja, akkor import állapotba kerül.