


Azzurro 818A 4M fűthető elektromos wellness ágy

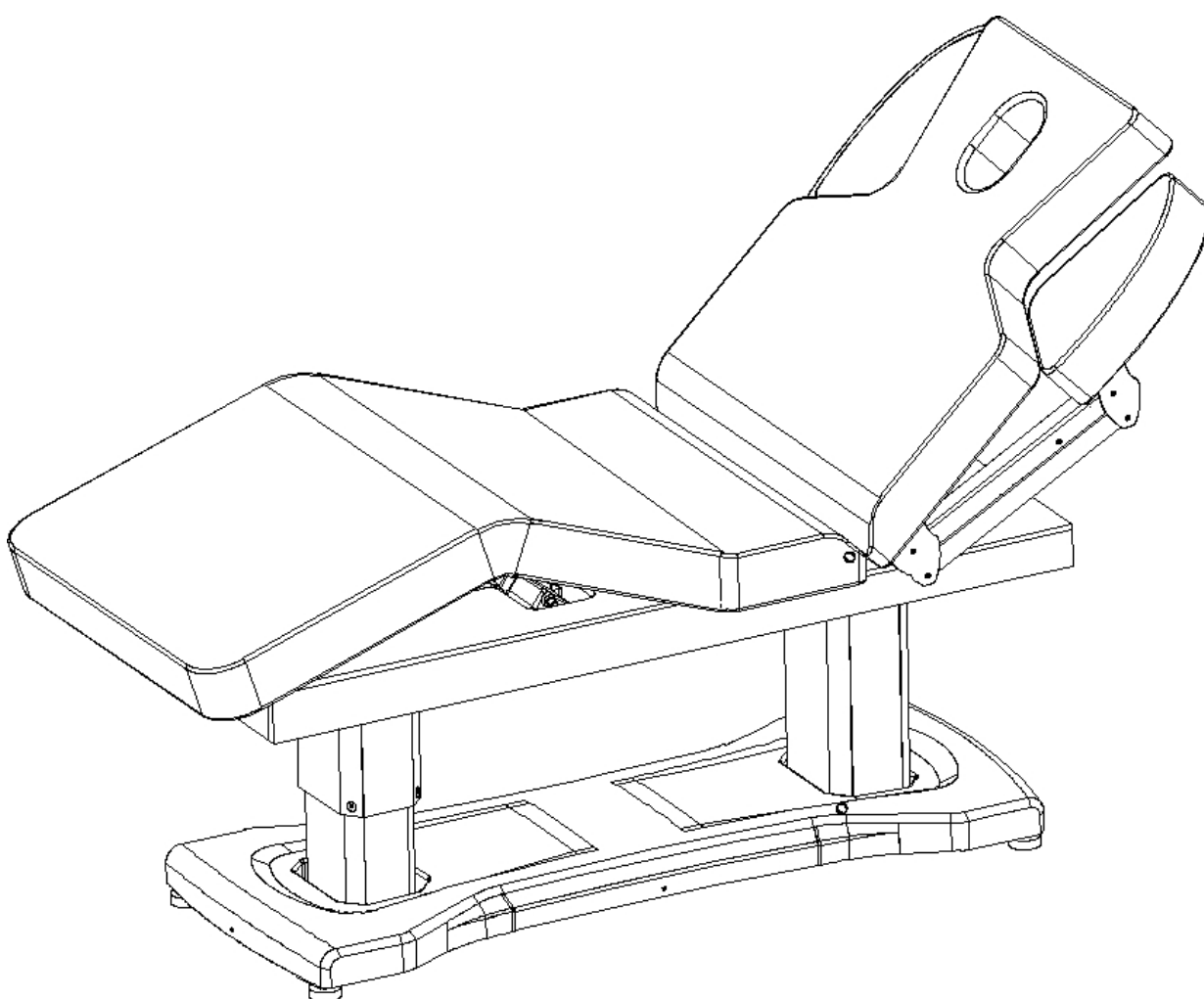

● Műszaki adatok:

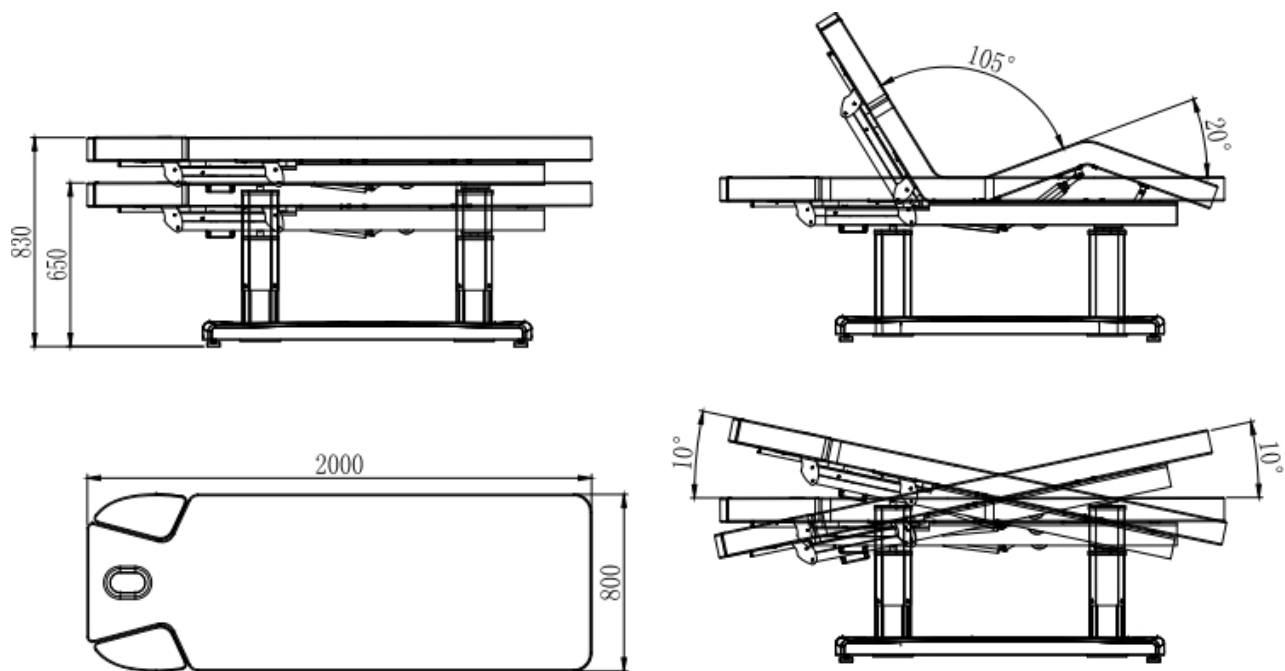


● Műszaki adatok:

Méretek:	2000*800*650 mm
Teherbírási:	200 kg
Nettó tömeg	103 kg
Állítható magasságtartomány	650~830 mm
Töltelék	szivacs
Bőr	PU/PVC

Használati specifikáció

● A kézi távirányító használati specifikációja

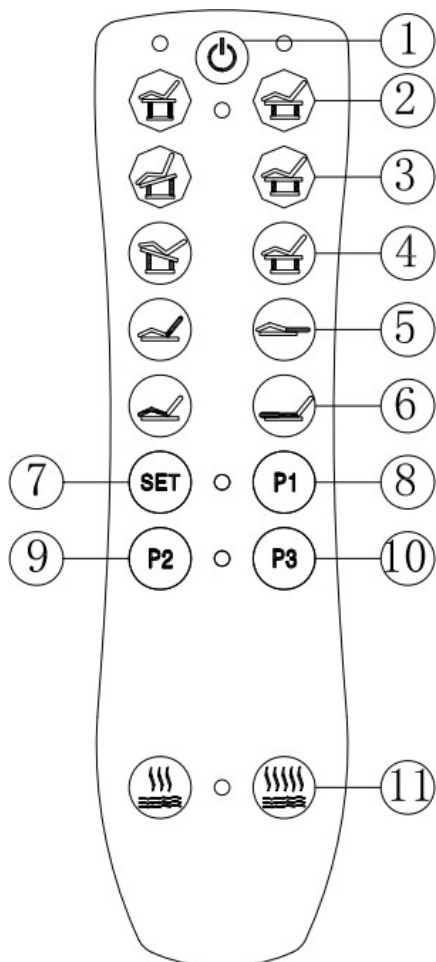

① A vezérlőpanel kapcsolója: nyomja meg a gombot a vezérlőpanelen, hogy bekapcsolja, és használhassa az összes funkciót. Nyomja meg újra a vezérlőpanelt (), hogy kikapcsolja, és az ágy visszatérjen

eredeti állapotába, nyomja meg újra a gombot, és a visszatér.

② Az gomb megnyomásával az egész ágy felemelkedik, az gomb megnyomásával az egész ágy visszatér az eredeti állapotába.

③ Az vagy a gomb megnyomásával állítsa be a ágy elülső részének dőlésszögét.

④ A vagy gombok megnyomásával állítsa be a hátsó rész dőlésszögét

a hátsó rész dőlésszögét.

⑤ Az vagy gomb megnyomásával állíthatja be a háttámla dőlésszögét.

⑥ A vagy gomb megnyomásával állítsa be a lábtartó dőlésszögét.

⑦~⑩ memória funkció, kövesse az alábbi lépéseket: először állítsa be a kívánt magasságot a háttámla, lábtartó

, tartsa lenyomva a gombot a memóriefunkció

elindításához, majd nyomja meg a , vagy


memóriaállapot gombot.

3féle memóriakészlet állítható be.

⑪ Nyomja meg a gombot, alacsony hőmérséklet nyomja, meg a gombot , magas hőmérséklet


● Magasság beállítása

Kapcsolja be a vezérlőpanel főkapcsolóját, nyomja meg a „” (Kezdés) vagy a „” (Beállítás) gombot a kívánt magasság beállításához.

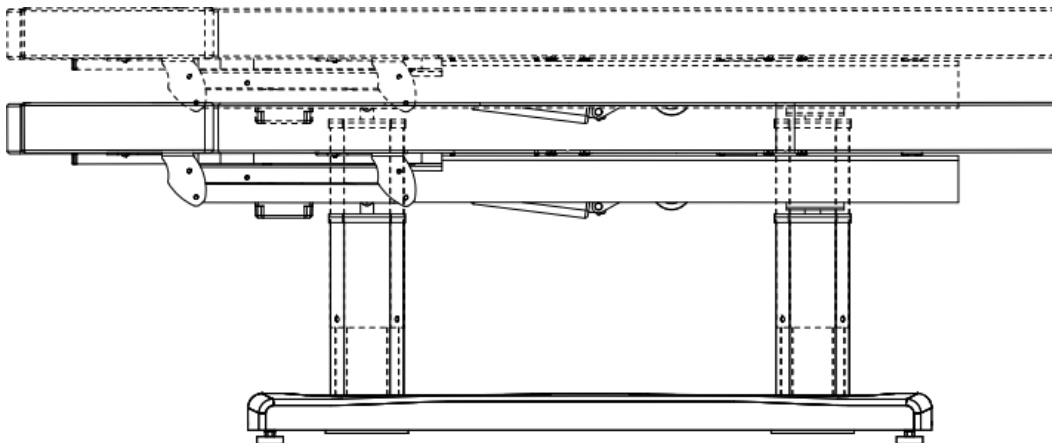


● Az egész ágy szögének beállítása

Nyomja meg a „” gombot a teljes ágy szögének felfelé történő beállításához, nyomja meg a „” gombot az ágy szintbe állításához; Nyomja meg a „” gombot az egész ágy lefelé irányuló szögének beállításához. Nyomja meg a „” gombot az a ágy vízszintes helyzetbe állításához.

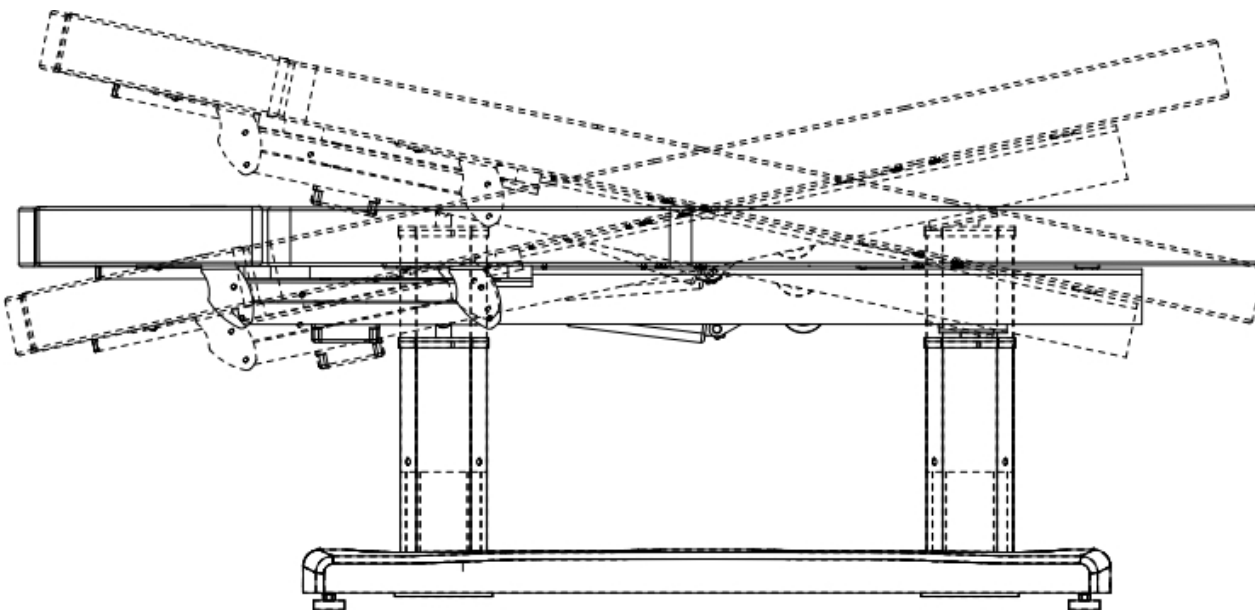


● A háttámla beállítása

Nyomja meg , a háttámla dőlésszöge megnő. Nyomja meg a  gombot, a háttámla dőlésszöge csökken.

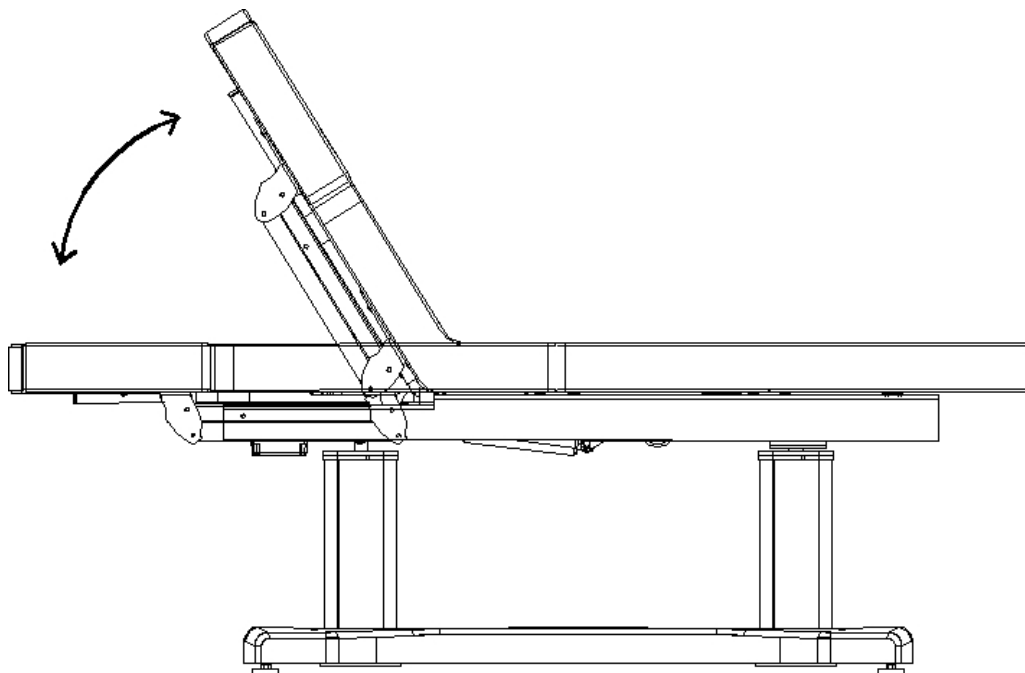


● Lábpárna beállítása

Nyomja meg a  gombot, és a lábtartó dőlésszöge megnő. Nyomja meg a  gombot, a lábtartó dőlésszöge csökken.

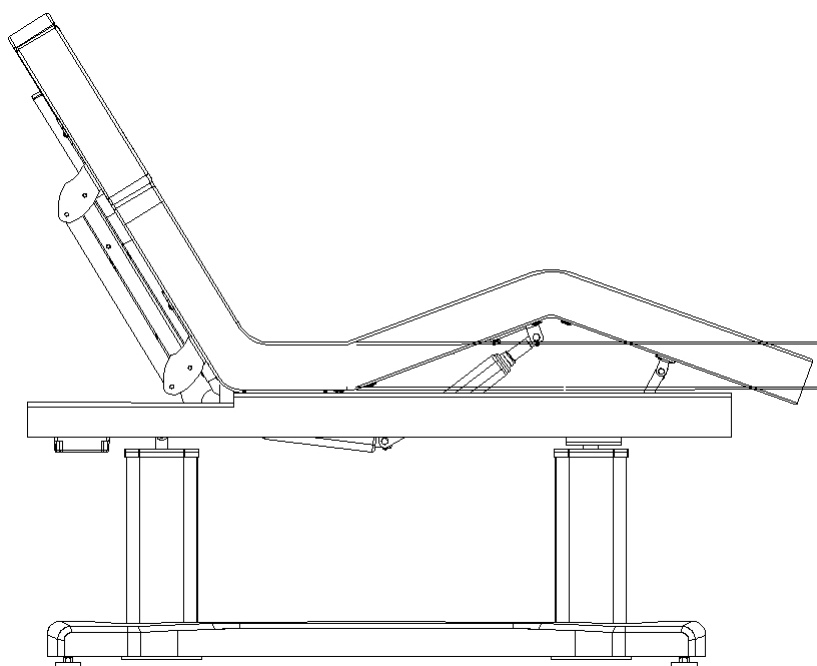


● A könyöktámasz beállítása

Nézze meg az alábbi képet: a nyíl irányának megfelelően tartsa lenyomva a gázrugót, és közben nyomja meg a könyöktámaszt a kívánt szögbe. Vagy fordított módon állítsa vissza.

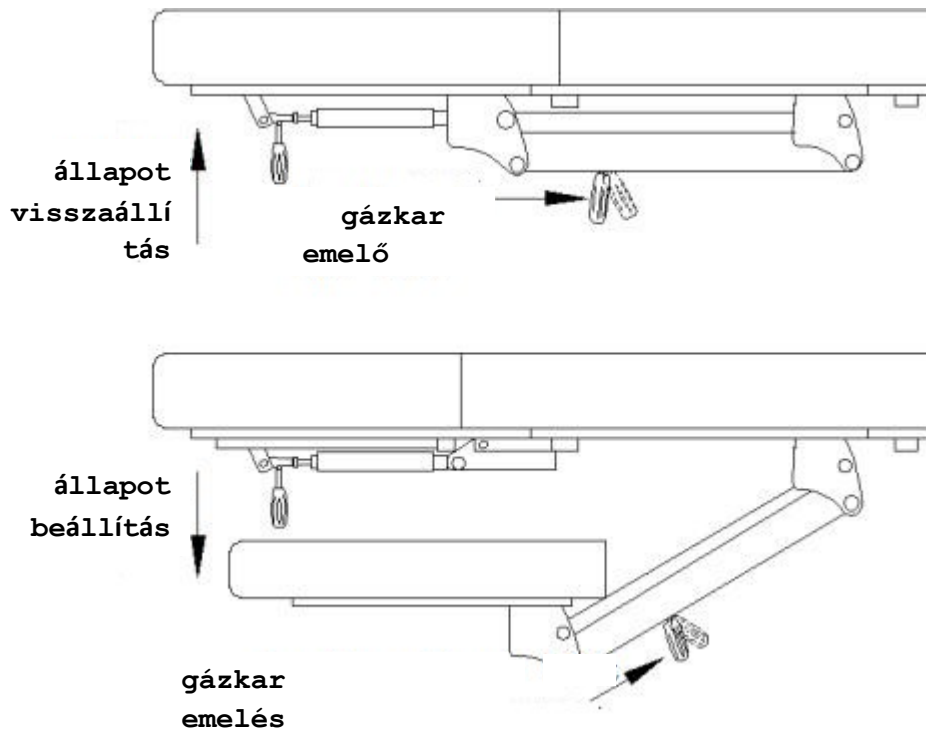

● Fontos utasítások :

- Ez az elektromos masszázsszágy háromvezetékes tápkábelt használ. Ezért azt egy háromlyukú csatlakozóba kell dugni, amelyben földelőelektróda van. Győződjön meg arról, hogy simán csatlakozik a földelőelektródához, hogy normál működés közben megakadályozza az áramütést.
- A tápkábelhez csatlakoztatott dugaszokat, gombokat és egyéb alkatrészeket nem szabad vízbe meríteni. vízbe vagy más folyadékba.
- Az elektromos masszázsszágy működése közben tilos a kezeket, lábakat, fejet vagy más testrészt a testnek a képen látható ① ② ③ ④ pozícióba helyezni.
- Tilos használni, ha a dugaszok, gombok és egyéb, a tápkábelhez csatlakozó alkatrészek sérültek.
- Fontos tudni, hogy a masszázsfotel motorjának frekvenciája 6 perc/óra.
- A karbantartást nem szabad hivatalos képzés nélkül elvégezni.

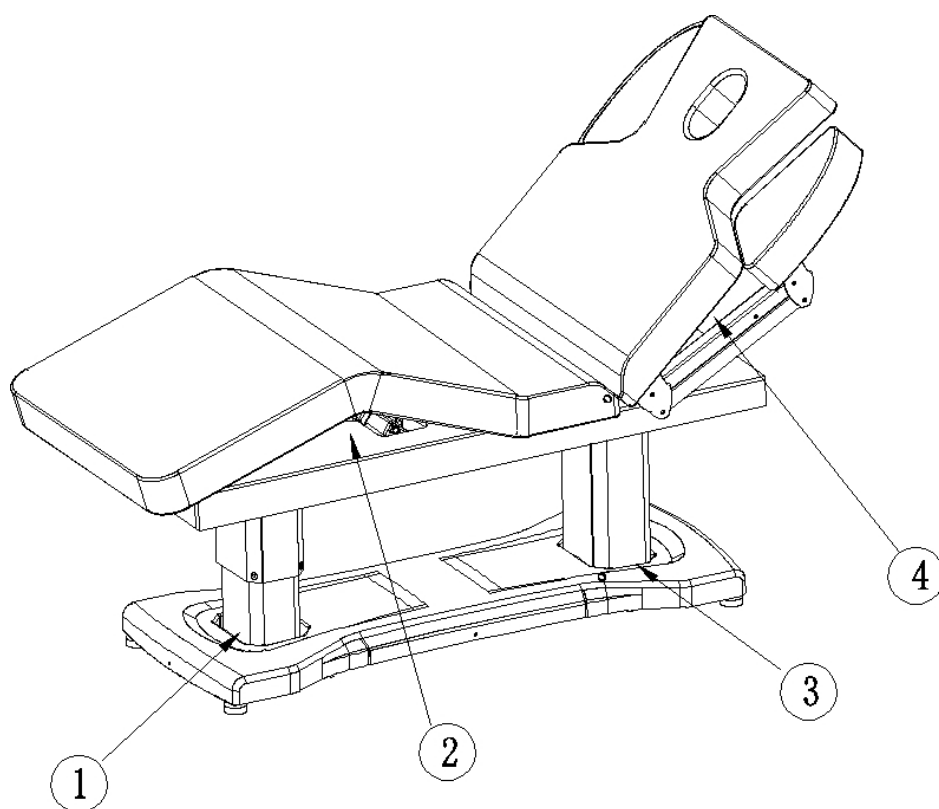

Figyelmeztetések:

1. Ezt a masszázsfotelet nem szabad osteoporosisban vagy szívproblémákban szenvedő személyeknek használni.
2. Ezt a masszázsfotelet nem használhatják terhes vagy menstruáló nők.
3. Ezt a masszázsfotelet sérült vagy fogyatékkal élő személyek nem használhatják.
4. Ezt a masszázsfotelet 14 év alatti gyermekek felügyelet nélkül és eszméletlen személyek nem használhatják;
5. A tápkábel és a dugasz sérüléseit a normál használat megkezdése előtt el kell hárítani. A meghibásodásokat szakembereknek vagy szolgáltatóknak kell elhárítaniuk.
6. A hivatalos használat előtt a feszültségnek meg kell felelnie a biztonságos feszültségnek. A helytelen feszültség a termék meghibásodásához vezethet.
7. A villamos áramütés veszélye miatt tilos nedves kézzel megérinteni a tápegységet.
8. A terméket nem szabad csatlakoztatni, amíg nincs felszerelve.
9. A tápkábelt el kell távolítani, hogy a gyalogosok ne botoljanak meg és ne essenek el.
10. A termék felületét puha ruhával és hígított semleges tisztítószerrel kell megtisztítani.
11. Ha nem használja, húzza ki a csatlakozót.
12. Ne szerelje szét ezt a terméket engedély nélkül. Szükség esetén kérje hivatalos szervizpartnerek segítségét a karbantartáshoz.

● A termék karbantartása:

1. Napi tisztítás
A port puha, száraz ruhával törölheti le.
2. Nagy szennyeződések eltávolítása
Mint mindannyian tudjuk, a nagy szennyeződések nehéz eltávolítani egy normál száraz ruhával. Ilyen esetben először használjon puha ruhát hígított semleges tisztítószerrel. Ezután használhat száraz ruhát a tisztításhoz.
3. Benzol, hígító, benzin vagy más oldószer használata tilos.
Ezek a oldószerek károsíthatják a bőrt vagy ronthatják a termékek megjelenését.
4. Tárolási és használati környezet
Ne tegye ki a terméket erős napfénynek és nedves környezetnek. Ellenkező esetben a termék megsérülhet.

A termék -5 °C és 50 °C közötti hőmérsékleten és 45% és 85% közötti páratartalom mellett használható.

● Hibajelzések :

Ha a termék használata során valami nem működik megfelelően, próbálja meg a következő módon ellenőrizni és elhárítani a hibás működést:

Jelenség	Diagnózis	Hibaelhárítás
A ágyat vezérli, de nincs semmilyen reakció.	1. A vezérlő tápellátásának kapcsolója be van kapcsolva vagy nincs.	1. Próbálja meg újra bekapcsolni a vezérlő tápellátásának kapcsolóját a vezérlőn.
	2. Ellenőrizze, hogy a pedál elérte-e a maximális pozíciót.	2. Próbálja meg a többi gombot is, hogy működnek-e vagy sem.
	3. Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozó.	3. Húzza ki a hálózati csatlakozót , majd csatlakoztassa újra.
	4. Ellenőrizze, hogy az összes csatlakozó dugó .	4. Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.
Zajszelés és rezgés felfelé és lefelé mozgáskor	Meglazult csavarok	Húzza meg az összes csavart
A lámpa nem világít, bár a kapcsoló be van kapcsolva.	Kiégett a biztosíték.	Cserélje ki a biztosítékot.
A vezérlőpanel jelzőfénye nem világít.	A vezérlő kábelje nincs csatlakoztatva, vagy a vezérlő meghibásodott.	Először csatlakoztassa újra a vezérlő kábelét. Ha továbbra sem működik, cserélje ki a vezérlőt.

Megjegyzések: Nem kap értesítést, ha a termék fejlesztései nem érintik annak megjelenését és működését.