



Brand for Beauty

A termék használati utasítása

Model: HY-M018

Teljes név: Beautyfor® Max nyirokmasszázs gép

I. Összefoglaló:

A karcsúsító, dekompresziós és méregtelenítő funkciók kombinálásával ez a szépségápolási készülék a modern szépségszalon elengedhetetlen felszerelése.


Ez a műszer 5 részből áll, összesen 24 darab légpárnával rendelkezik, a jobb és a bal oldal közötti összes légpárna szimmetrikus, az egyik légpárna a deréktájon, a másik a hasi területen van. A légpárnák a felső és alsó, valamint a jobb és bal lábszár területén szimmetrikusan helyezkednek el. Minden légpárna hatással lehet arra a részre, amelynek fogynia kell.

II. Termék funkció:

1. Detox;
2. A testalkat formálása;
3. Fogys ;
4. A nyirokrendszer stimulálása;
5. A test dekompresziója és relaxációja;
6. A sejtek és a bőr gyulladásának csökkentése;

Ez a berendezés segít a kikapcsolódásban és a fogyásban, miközben formálja az alakját. A légnyomás rendszeres mozgása elősegíti a vizeletürítést, a székletürítést és a nyirokáramlást; felgyorsítja a vérkeringést; csökkenti a szennyező anyagok mennyiségét a szervezetben, valamint csökkenti a melanint és a foltokat a bőrön.


III. Panel diagram:

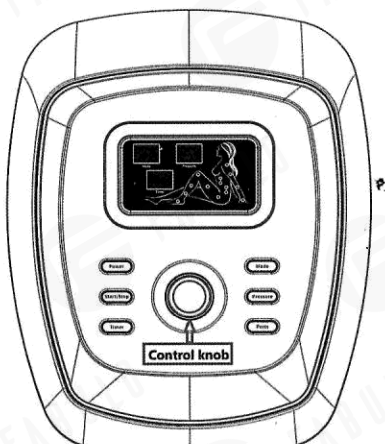


V. Használati utasítás:

1. Először csatlakoztassa a 220V-os feszültséget, majd a készülék készenléti üzemmódban van, a "Mode" képernyőn a "Pressure" (Nyomás) és az "Időzítő" képernyőn a "___" jelenik meg.
2. Nyomja meg a "Power" gombot, a "Mode", "Pressure" és "Timer" képernyőn kék fényben megjelenik egy szám. Két munkamód van:
 - 1) Automatikus üzemmód (alapértelmezett):
 - A. Nyomja meg a "Pressure" gombot, a "Pressure" képernyő villogni fog, majd fordítsa a vezérlőgombot jobbra, és állítsa be a nyomást 1-től 3-ig (Kicsi, Közepes és Nagy).
 - B. Nyomja meg az "Timer" gombot, az "Timer" képernyő villogni fog, majd fordítsa a vezérlőgombot jobbra, és állítsa be az időt (1-60 perc)

IV. A légpárnákat ábrázoló kép (összesen 24 db):

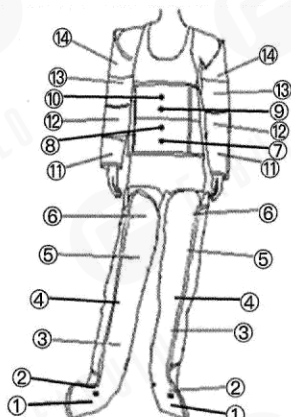

C. Nyomja meg a "Mode" gombot, a "Mode" képernyő villogni fog, majd forgassa a vezérlőgombot jobbra az üzemmódok kiválasztásához. működés (1-től 6 üzemmódig). kérjük, tekintse meg a rajzot, amely azt mutatja, hogy a légzsákok hogyan fognak a lábaktól a hasig rázkódni:

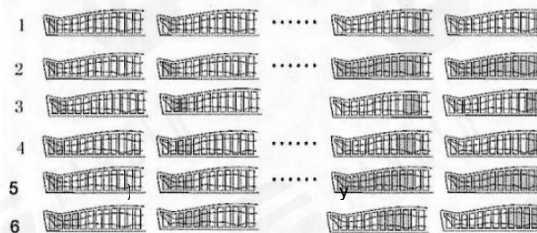

- D. Ha befejezte a fenti A, B, C pontokat, nyomja meg a "Start/stop" gombot a kiválasztott masszázshoz elindításához.
2. Kézi üzemmód: Nyomja meg a "Power" gombot a gép bekapcsolásához és nyomja meg a "Mode" gombot, majd forgassa a vezérlőgombot jobbra, amíg a "Mode" képernyőn meg nem jelenik a "hd", ami azt jelenti, hogy a gép kézi üzemmódban van, ekkor megnyomhatja a "Parts" gombot - a fény kialszik és a vezérlőgombot jobbra forgatva kiválaszthatja, hogy melyik részt szeretné masszírozni, ha kiválasztotta a kívánt részt, nyomja meg még egyszer a "Parts" gombot a megerősítéshez. Ha egyszerre több testrészre szeretne masszírozni, akkor a "Parts" gombbal egyenként erősítse meg az egyes részeket.
- Ha a fentieket elvégezte, nyomja meg a "Pressure" gombot és az "Timer" gombot a kívánt nyomás és idő kiválasztásához, majd nyomja meg a "Start/stop" gombot a kiválasztott masszázsmódszer elindításához.
3. Ha a gép már működik, de az automatikus üzemmódról kézi üzemmódra szeretne váltani (vagy fordítva), nyomja meg a "Start/Pause" gombot a gép leállításához, majd ismételje meg az 1) vagy 2) lépést szükség szerint.

4. Amikor a készülék működésben van, csak a "Pressure" és az "Timer" gombokkal lehet beállítani. A "Mode" gombot azonban csak a műszer működésének leállítását követően lehet beállítani.

5. A készülék a kiválasztott idő után automatikusan leáll. Az eljárás leállításához nyomja meg a "Start/Pause" gombot a műszer működésének leállításához, és kapcsolja ki az áramot a dugó kihúzásával.

VI. Az idő ellenőrzésére vonatkozó utasítások:

- ☒ 1. típus: Túlsúly - válassza az "Automatikus üzemmód" 1. módszerét, és az ajánlott idő 60 perc.
- ☒ 2. típus: Közepesen zsíros - válassza az 1. módszert és a 2. módszert az "Automatikus üzemmódban", és a javasolt idő 30-45 perc mindkettőre együtt.
- ☒ 3. típus: Kevésbé zsíros -- Válassza az 1. módszert: "Automatikus üzemmód" 20 percig, majd válassza a "Kézi üzemmódot" 15 percig,
- ☒ 4. típus: A karcsúság fenntartása - az "Automatikus üzemmód" 1. és 6. módszerének bármelyikét válassza 20-30 percig, egy vagy több módszert változtatva).
- ☒ 5. típus: nyirokrendszer tisztítása - válassza a 3. módszert, az "automatikus üzemmódot" 20-35 percig.

VII. Alkalmas:

1. Fogyni vágyóknak (segíthet a fogyásban, de nem fognak sokat fogyni, ha csak ezt az eszközt használják).
2. Azoknak, akik a gyermekvállalás után szeretnének fogyni.
3. Embereknek, akik székrekedésben szenvednek vagy lassú a nyirokkeringésük, általában kiütések és foltok jelentkeznek náluk.

VIII. Olyan személyek, akik számára a készülék nem alkalmas:

- ☒ Fertőző betegségben szenvedők.
- ☒ Akut betegségben szenvedők.
- ☒ Szívbeteg.
- ☒ Magas vérnyomásban, agyi infarktusban szenvedő vagy súlyos állapotban lévő személyek.
- ☒ Vérzéses betegség vagy sérülés.
- ☒ A menstruáló nők nem használhatják a hasi részt.
- ☒ Nem alkalmas várandós nők számára.

IX. Műszaki adatok:

Tápfeszültség: 220V Teljesítményfrekvencia: 50HZ
Névleges teljesítmény: 120W Névleges áram: 30W. 0.15A

