



Brand for Beauty

A termék használati utasítása

Model: **HY-D018**

Teljes név: **Beautyfor® nyirokmasszázs gép**

### I. Összefoglaló:

A karcsúsító, dekompresziós és méregtelenítő funkciók kombinálásával ez a szépséggép a modern szépségszalon elengedhetetlen felszerelése.


Ez a műszer 5 részből áll, összesen 18 darab légpárnával rendelkezik, a jobb és a bal oldal közötti összes légpárna szimmetrikus, az egyik légpárna a deréktáján, a másik a hasi területen van. A légpárnák a felső és alsó, valamint a jobb és bal lábszár területén szimmetrikusan helyezkednek el. Minden légpárna hatással lehet arra a részre, amelyiknek fogynia kell.

### II. Termék funkció:

1. Detox;
2. A testalkat formálása;
3. Fogyas ;
4. A nyirokrendszer stimulálása;
5. A test dekompresziója és relaxációja;
6. A sejtek és a bőr gyulladásának csökkentése;

Ez a berendezés segít a kikapcsolódásban és a fogyásban, miközben formálja az alakját. A légnyomás rendszeres mozgása elősegíti a vizeletürítést, a székletürítést és a nyirokáramlást; felgyorsítja a vérkeringést; csökkenti a szennyező anyagok mennyiségét a szervezetben, majd csökkenti a melanint és a foltokat a bőrön.

### III. Panel diagram:

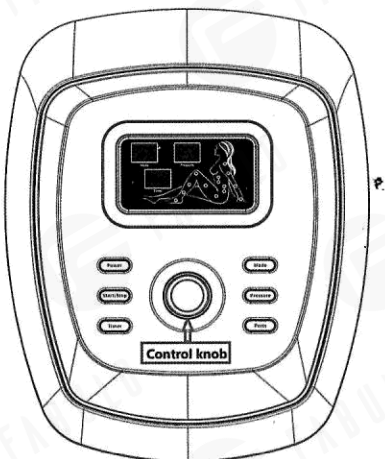

### V. Használati utasítás:


1. Először csatlakoztassa a 220V-os feszültséget, majd a készülék készenléti üzemmódban van, a "Mode" képernyőn a "Pressure" (Nyomás) és az "Időzítő" képernyőn a "\_\_\_" jelenik meg.
2. Nyomja meg a "Power" gombot, a "Mode", "Pressure" és "Timer" képernyőn kék fényben megjelenik egy szám. Két munkamód van:

1) Automatikus üzemmód (alapértelmezett):


- A. Nyomja meg a "Pressure" gombot, a "Pressure" képernyő villogni fog, majd fordítsa a vezérlőgombot jobbra, és állítsa be a Nyomást 1-től 3-ig (Kicsi, Közepes és Nagy).

- B. Nyomja meg az "Timer" gombot, az "Timer" képernyő villogni fog, majd fordítsa a vezérlőgombot jobbra, és állítsa be az időt (1-60 perc)

### IV. A légpárnákat ábrázoló kép (összesen 18 db):

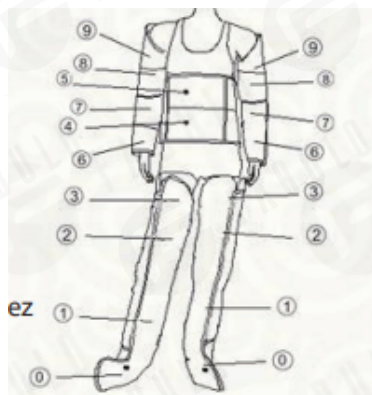

C. Nyomja meg a "Mode" gombot, a "Mode" képernyő villogni fog, majd forgassa a vezérlőgombot jobbra az üzemmódok kiválasztásához. működés (1-től 6 üzemmódig). Kérjük, tekintse meg a rajzot, amely azt mutatja, hogy a légszákok hogyan fognak a lábaktól a hasig rázkódni:

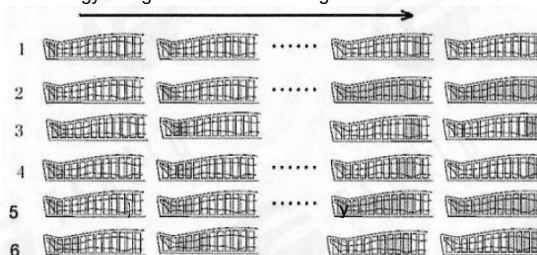

D. Ha befejezte a fenti A, B, C pontokat, nyomja meg a "Start/stop" gombot a kiválasztott masszázs elindításához. 2. Kézi üzemmód: Nyomja meg a "Power" gombot a gép bekapcsolásához és nyomja meg a "Mode" gombot, majd forgassa a vezérlőgombot jobbra, amíg a "Mode" képernyőn meg nem jelenik a "hd", ami azt jelenti, hogy a gép kézi üzemmódban van, ekkor megnyomhatja a "Parts" gombot - a fény kialszik és a vezérlőgombot jobbra forgatva kiválaszthatja, hogy melyik részt szeretné masszírozni, ha kiválasztotta a kívánt részt, nyomja meg még egyszer a "Parts" gombot a megerősítéshez. Ha egyszerre több testrészt szeretne masszírozni, akkor a "Parts" gombbal egyenként erősítse meg a részeket.

Ha a fentiek elvégezte, nyomja meg a "Pressure" gombot és az "Timer" gombot a kívánt nyomás és idő kiválasztásához, majd nyomja meg a "Start/stop" gombot a kiválasztott masszázsmódszer elindításához.

3. Ha a gép már működik, de az automatikus üzemmódról kézi üzemmódra szeretne váltani (vagy fordítva), nyomja meg a "Start/Pause" gombot a gép leállításához, majd ismétlje meg az 1) vagy 2) lépést szükség szerint.

4. Amikor a készülék működésben van, csak a "Pressure" és az "Timer" gombokkal lehet beállítani. A "Mode" gombot azonban csak a műszer működésének leállítása után lehet beállítani.

5. A készülék a kiválasztott idő után automatikusan leállítja a működést. Az eljárás leállításához nyomja meg a "Start/Pause" gombot a műszer működésének leállításához, és kapcsolja ki az áramot a dugó kihúzásával.

### VI. Az idő ellenőrzésére vonatkozó utasítások:

- 1. típus: Túlsúly - válassza az "Automatikus üzemmód" 1. módszerét, és az ajánlott idő 60 perc.
- 2. típus: Közepesen zsíros - válassza az 1. módszert és a 2. módszert az "Automatikus üzemmódban", és a javasolt idő 30-45 perc mindkettőre együtt.
- 3. típus: Alacsony zsírtartalom – Válassza az 1. módszert: "Automatikus üzemmód" 20 percig, majd válassza a "Kézi üzemmódot" 15 percig,
- 4. típus: A karcsúság fenntartása - az "Automatikus üzemmód" 1. és 6. módszerének bármelyikét válassza 20-30 percig, egy vagy több módszert változtatva).
- 5. típus: A nyirokrendszer tisztítása - válassza a 3. módszert, az "automatikus üzemmódot" 20-35 percig.

### VII. Alkalmos:

1. Fogyni vágyóknak (segíthet a fogyásban, de nem fognak sokat fogyni, ha csak ezt az eszközt használják).
2. Azoknak, akik a gyermekvállalás után szeretnének fogyni.
3. Embereknek, akik székrekedésben szenvednek vagy lassú a nyirokeringésük, általában kiütések és foltok jelentkeznek náluk.

### VIII. Olyan személyek, akik számára a készülék nem alkalmas:

- Fertőző betegségben szenvedők.
- Akut betegségben szenvedők.
- Szívbetegség.
- Magas vérnyomásban, agyi infarktusból szenvedő vagy súlyos állapotban lévő személyek.
- Vérzéses betegség vagy sérülés.
- A menstruáló nők nem használhatják a hasi részt.
- Nem alkalmas várandós nők számára.

### IX. Műszaki adatok:

Tápfeszültség: 220V Teljesítményfrekvencia: 50HZ

Névleges teljesítmény: 60W Névleges áram: 30W. 0.15A

