

Forrólevegős sterilizátor

Beautyfor YM-9011

Használati útmutató



Köztudott, hogy a magas hőmérséklet képes elpusztítani a termékben rekedt

baktériumokat és vírusokat. A maximális hőmérséklet elérheti a 200 Celsius fokot. Ezt a

berendezést használják laboratóriumokban, élelmiszeriparban és szépségszalonokban.

Biztonsági figyelmeztetés

- kérjük, hogy a gépet szellőztetett helyiségben használja
- csak száraz tárgyakat tegyen a sterilizátorba
- **a bal oldali gomb a hőmérséklet szabályozására szolgál**
- **a jobb oldali gomb a be-/kikapcsolásra és az időzítő beállítására szolgál**
- a készüléket rendszeresen tisztítsa meg alkoholos vattával
- a készüléket gyermekek elől elzárva kell tartani
- a sterilizálás után akassza bele a gyűrűt a tálcába, és vegye ki a tálcát a készülékből
- minden használat után válassza le a tápegységet
- **NE ÉRINTSE MEG KÉZZEL A FORRÓ TÁLCÁT!**

Paraméterek:

- Teljesítmény: 300 W
- Hőmérséklet beállítása: 0- 200 °C
- Feszültség: (220-240 V /50 Hz)