

BeautyOne SM-360A forrólevegős sterilizátor



Műszaki adatok

Teljesítmény	300W
Feszültség	220-240V, 50Hz
Űrmérték	2.6L
Súly	3.1kg
Méret	27 x 24.5 x 17.2 cm
Üzemi hőmérséklet	50-220°C
Munkaidő	10-60 perc

FIGYELEM!

Használat előtt távolítsa el a készülék belsejében elhelyezett védőfóliákat!

Használja a címet.

1. A **sterilizátor** fém, műanyag és kompozit anyagokból készült eszközök (olló, fésű, csipesz stb.) fertőtlenítésére szolgál.
 2. A fertőtlenítés magas hőmérsékletű levegővel történik, hogy a műszerek ne szenvedjenek mechanikai sérülést. A nedvességtől mentes baktériumok elpusztulnak, és az éles műszerek nem tompulnak.
 3. A készülék hőmérséklet- és időszabályozóval van felszerelve, így az eljárás elvégzéséhez szükséges paraméterek könnyen beállíthatók.
-

Első használat előtt:

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt utasításokat.
 2. Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és védőfóliát.
-

Használati utasítás

1. Helyezze a szerszámokat a tálcára, és helyezze be a gépbe. Csukja be a fedelet.
 2. Ezután csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
 3. A beavatkozási idő beállításához használja a vezérlőgombot. A kívánt idő kiválasztásához forgassa jobbra. A piros lámpa kigyullad, jelezve, hogy a készülék működési üzemmódban van. Az idő visszaszámol, mint egy időzítőn. Az idő leteltével a készülék hangjelzéssel jelzi a munka végét.
 4. Ezután állítsa be a hőmérsékletet a szabályozógomb jobbra fordításával. A zöld jelzőfény világítani fog.
 5. A lámpák kiallszanak, amikor a készülék nem működik.
 6. Ha az eljárás befejeződött, válassza le a készüléket a tápegységről, és vegye ki a műszereket a készülékből.
 7. A csomaghoz tartoznak fogantyúk - kis gyűrűk, amelyeket a tálca oldalsó kiemelkedéseihez rögzíthet, hogy eltávolíthassa azt anélkül, hogy a kezével megérintené.
-

Figyelem!

Ne feledje, hogy a tálcák, a belső és a külső felületek nagyon felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt.

Ne érintse közvetlenül a forró tálcát! Várjon egy pillanatot, amíg lehűl, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A berendezés szépségszalonokban való használatra tervezett professzionális berendezés. Kizárólag képzett kozmetikus személyzet kezelheti, hogy elkerülje a káros hatásokat az eljárás során.

Biztonsági utasítások

1. A készüléket nem szabad szétszedni, illetve a jelen használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő célra használni. Minden szervizelést és javítást csak erre felhatalmazott szerviztechnikus végezhet.
 2. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel telepíteni vagy működtetni, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.
 3. A következő esetekben azonnal válassza le a készüléket a hálózatról, és forduljon hivatalos szervizhez.
 4. a) folyadék került a berendezésbe,
b) a készülék szokatlan szagot, füstöt vagy furcsa hangokat bocsát ki,
c) a tápkábel sérült,
d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
 5. A kábelekre nem szabad tárgyakat helyezni. A berendezés nem helyezhető el olyan helyen, ahol valaki becsípheti a tápkábelt.
 6. Biztonsági okokból a tápkábelt minden használat után ki kell húzni a konnektorból.
 7. A készülék nyílásaiba nem szabad semmit behelyezni. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, azonnal húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
 8. A készüléket nem szabad instabil kocsira, polcra vagy járműre helyezni. Leesés esetén a berendezés megsérülhet.
 9. A készülék élettartamának garántálása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartani.
 10. A tápegységnek meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a berendezés meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.
-

Megjegyzés:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - hogy elkerülje a veszélyt.
 2. Ezt a berendezést 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy képzést biztosítanak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértették.
 3. A készüléket nem gyermekeknek szánták játékra. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
 4. A berendezést nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha a közelben gyermekek vagy olyan személyek tartózkodnak, akik nem rendelkeznek kellő ismeretekkel a berendezés használatáról.
 5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék nem megfelelő használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés sérülés vagy akár halál kockázatát is jelentheti, ezért a készüléket gyermekek elől elzárva használja és tartsa.
-

Berendezések ártalmatlanítása

A használt elektromos berendezéseket, készülékeket és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokba kell szállítani. Az elektromos berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat kell betartani. A környezet védelme érdekében, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU rendeletnek megfelelően a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd a használt elektronikus és elektromos hulladékok gyűjtőhelyein kell leadni. A régi berendezések hasznos élettartamuk végén értékes, újrahasznosítható elemeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni.

Tárolás és szállítás

A berendezést kizárólag eredeti csomagolásában, 20 °C és 50 °C közötti hőmérsékleten kell szállítani. A berendezést jól szellőző helyen, 75 %-nál nem nagyobb relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között van. A tárolás és szállítás során a készüléket nem szabad eldobni, leejteni, mechanikai ütéseknek kitenni, illetve az időjárási körülményeknek kitenni.

2.