

## Magas hőmérsékletű szekrény eszközfertőtlenítéshez



**Kérjük, használat előtt olvassa el az alábbi használati útmutatót!**

### Termékjellemzők

Ez a termék távoli infravörös fertőtlenítést használ, amit gyors, nagy hatékonyságú, biztonságos és megbízható előnyök jellemeznek. Használható magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok fertőtlenítésére (például: olló és egyéb fém tárgyak, üveg palackok és egyéb edények). A termék nem alkalmas pamut, műanyag, papír és egyéb tárgyak magas hőmérsékletű fertőtlenítésre vagy gyúlékony termékekhez.

### Műszaki paraméterek

Kapacitás (12L) Feszültség (220V) Teljesítmény (1000W) Frekvencia (50Hz)

### Útmutatások

1. Távolítsa el minden tartozékot és csomagolást a fertőtlenítő szekrényből.

2. Tisztítsa meg az állványt és a tányért meleg vízzel, törölje át a fertőtlenítő szekrény belsejét mosószerbe mártott puha, nedves kendővel, és várja meg, amíg minden megszárad.
3. A fertőtlenítő szekrény körül elegendő szabad teret kell fenntartani, hogy a felület legalább 10 cm távolságra legyen más tárgyaktól; semmit sem szabad ráhelyezni.

### Figyelmeztetés

1. Első használatba vételkor a hőmérsékletet a legmagasabb hőmérsékletre kell állítani, és 15 percig előmelegíteni a maradék olajos gőzök eltávolítása érdekében. Az első használat során a kibocsátott szag szokványos jelenség, mivel a fűtőcsövet védőfóliával vonták be, hogy megakadályozzák a szállítás közbeni sérülését.
2. Ennél a folyamatnál a fertőtlenítő cső kialszik, ami normális jelenség, mivel a szekrény az automatikus izoláció után (a fertőtlenítő cső kialszik) eléri a beállított hőmérsékletet, amikor a szekrényen belüli hőmérséklet ismét helyreáll.
3. Az ajtónál lévő rés a fertőtlenítő szekrény belső hőelvezetésére szolgál, nem jelent hibát.

### Idő beállítása

Időzítő: 0-30 perc között beállítható, maximum 30 percre. Fordítsa az időzítőt az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt pozícióba. A beállított idő leteltével csengőhangot hallható, és a fertőtlenítő szekrény automatikusan lekapcsolja az áramellátást.

### Hőmérséklet beállítása

A legjobb eredmények elérése érdekében a sterilizátor négy különböző hőmérséklet-modulációs lehetőséget biztosít 100-250 fok között, amelyekkel szabályozható a fertőtlenítési hőmérséklet.

**Figyelem:** Ha a fertőtlenítő szekrény üzemkész állapotban van, valamint a munkaidő letelte után egy bizonyos ideig a cső belső fertőtlenítése szigorúan tilos, mivel a külső felületi hőmérséklet nagyon magas lehet. Ne érintse meg.