

Fabulo Camino masszázságyak

HU



W14114

Használati útmutató

Fabulo Camino Cabello



Fabulo Camino Russell



Fabulo Camino Treat



Fabulo Camino Infinity

Forgalmazó:

iM3 s.r.o., Kistejed u. 515/8, Dunaszerdahely, 929 01, Szlovákia
Web: www.fabulo.hu, E-mail: info@fabulo.hu, Tel: 0670 282 6028

Figyelmeztetés



Kövesse az alábbi óvintézkedéseket, és használja a terméket rendeltetés-szerűen a sérülések, halálos kimenetelű balesetek és anyagi károk elkerülése érdekében.

A helytelen beállítás, üzemeltetés vagy karbantartás sérülésveszélyessé teheti a terméket.

A termék használatba vétele előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.

Az asztal kicsomagolásakor ellenőrizze a készlet tartalmát és a kárpitozást. Ne használja az asztalt, ha azon bárminemű sérülést észlel. (A garancia nem terjed ki a nem megfelelő beállítás, baleset vagy visszaélés által okozott károkra).

A terméket kizárólag rendeltetészerűen használja jelen útmutatóban ismertetett célra és módon.

Biztonsági okok miatt ne szerelje szét a lábpedált, vezérlőszekrényt és meghajtó berendezéseket.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a hát- vagy lábtámla alá.

Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak.

Ne fordítsa oldalára az asztalt megfelelő biztonsági óvintézkedések nélkül, mivel az asztalok súlya meghaladja a 90 kg-ot.

Biztonsági útmutatások

Évente ellenőrizze az összes csatlakozást.

A termék jogosulatlan módosítása vagy átalakítása tilos, és ennek következményeképp a garancia érvényét veszti.

Jótállási nyilatkozat

3 éves garancia az asztal vázszerkezetére és 2 év a tartozékokra.

2 éves garancia a habszivacsra és kárpitozásra.

A garancia minden esetben a gyártó által forgalmazott pótalkatrészekre, alkatrészcsere és javításra korlátozódik.

Az összes garancia fentebb ismertetett. Nincs egyéb feltételezett, kifejezett vagy hallgatolagos garancia.

I. fejezet: Termékjellemzők



Fabulo Camino Russell

Teherbírás: 200 kg
Hossz: 198 cm
Szélesség: 74 cm
Magasság: 45cm ~ 95 cm
Súly: 68 kg

Fabulo Camino Cabello

Teherbírás: 200 kg
Hossz: 198 cm
Szélesség: 74 cm
Magasság: 45cm ~ 95 cm
Súly: 77 kg



Fabulo Camino Treat

Teherbírás: 200 kg
Hossz: 198 cm
Szélesség: 74 cm
Magasság: 45 cm ~ 95 cm
Súly: 78 kg

Fabulo Camino Infinity



Teherbírás: 200 kg
Hossz: 198 cm
Szélesség: 74 cm
Magasság: 45 cm ~ 95 cm
Súly: 72 kg





II. fejezet: Útmutatások

Magasság beállítása

►► Lábpedál kezelése

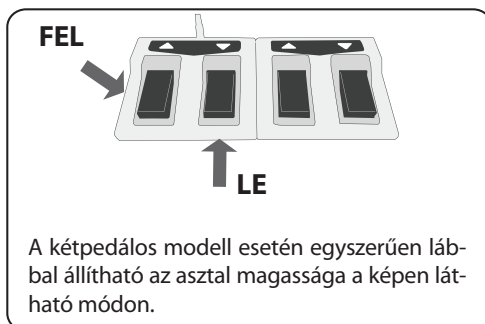
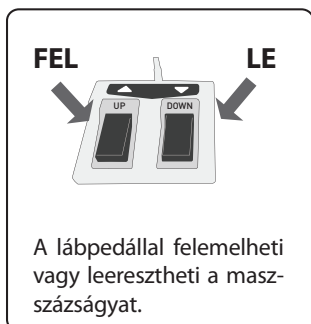


►► Kézi vezérlő

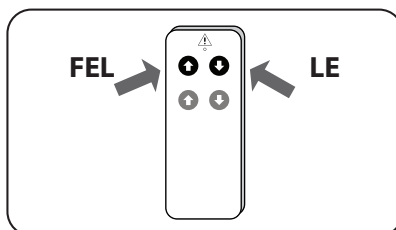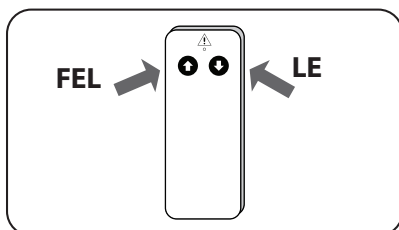

A kézi vezérlővel a képen látható módon állíthatja be az asztal magasságát. Az asztal megemeléséhez nyomja meg a bal gombot. Az asztal leeresztéséhez nyomja meg a jobb gombot.

►► Lábvezérlő

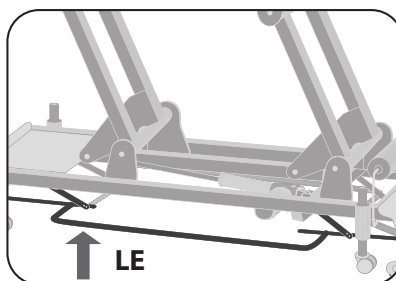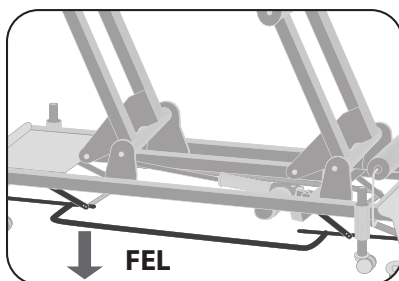


A lábvezérlő rendkívül kényelmes és egyszerű használatot biztosít, egyszerűen rálépve növelhető az asztal magassága. Az asztal leeresztéséhez egyszerűen emelje meg a szabályzót és az asztal leereszkedik.



Középső rész beállítása

► Vezérlés lábpedállal

A középső részt a lábvezérlő jobb oldali részével állíthatja be egyszerűen megnyomva a lábpedált a képen látható módon, igény szerint felemelve vagy leeresztve a középső részt. Ha az asztal eléri a megfelelő magasságot, engedje el a lábvezérlőt.

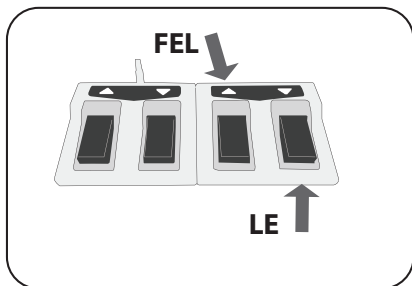


► Oldalsó vezérlőpanel

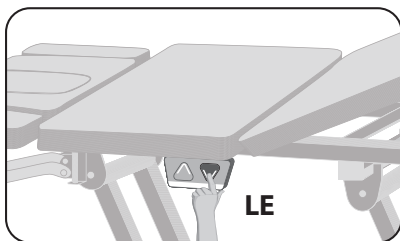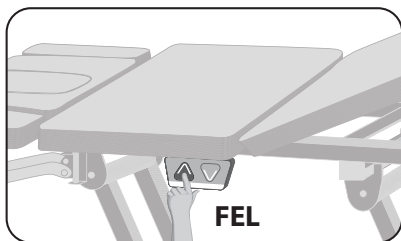

Ha az Ön által vásárolt modell oldalsó vezérlőpanellel rendelkezik, egyszerűen nyomja meg a bal gombot a középső rész megemeléséhez. A jobb gomb megnyomásával leeresztheti a középső részt.

► Kézi vezérlés



A kézi vezérlő segítségével a képen látható módon, állítsa be az asztal középső részét. A középső rész megemeléséhez nyomja meg a bal oldali gombot. A középső rész leeresztéséhez pedig nyomja meg a jobb oldali gombot. Ha az asztal eléri a megfelelő magasságot, engedje el a gombot.

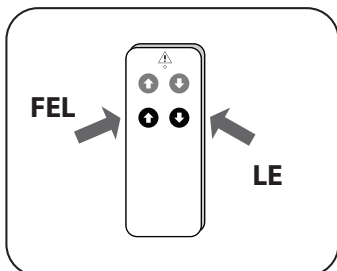

A pneumatikus rendszer beállítása

► Láb- és háttámla beállítása


! A hát- és lábtámla megemelését és leeresztését biztosító pneumatikus rendszer modellektől függően eltérő lehet.

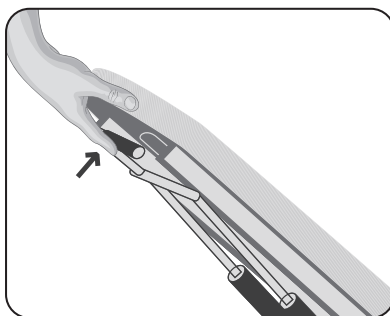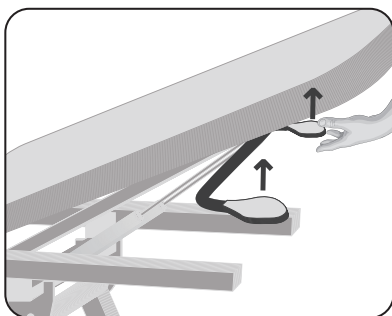

A hát-/lábtámla dőlésszögének beállításához egyszerűen fogja meg erősen és óvatosan húzza felfelé a kart. Ügyeljen rá, hogy a beállítás során stabilan fogja a hát-/lábtámlát. Engedje el a kart, ha a hát-/lábtámla a megfelelő szögben áll, ekkor a hát-/lábtámla automatikusan ebben a szögben rögzül.

► A fejtámla beállítása

A fejtámla beállításakor fogja meg a fejtámlát és húzza felfelé a kart. A megfelelő dőlésszög elérésekor engedje el a kart, ekkor a fejtámla automatikusan ebben a szögben rögzül.

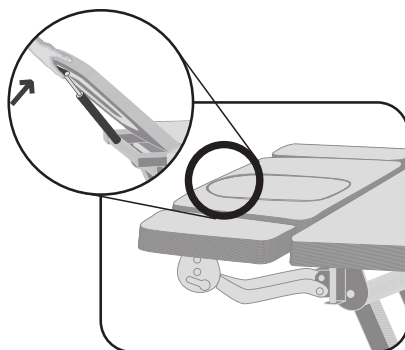


► A kartámla beállítása

A kartámla beállításához fogja meg a kartámlát és húzza felfelé a kart. Állítsa be igénynek megfelelően a kartámlákat. A megfelelő dőlésszög elérésekor engedje el a kart, ekkor a kartámla automatikusan ebben a szögben rögzül.



Ha csak a fejtámlát szeretné megemelni, nem szükséges meghúzni a kart.

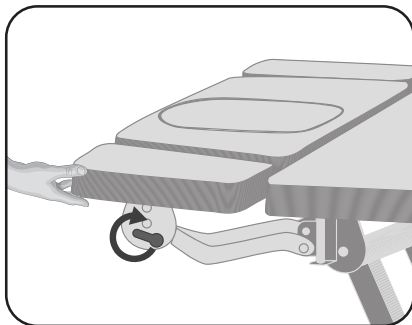

III. fejezet: Hibaelhárítás

Gyorsdiagnosztika:

1. Kettős meghajtással ellátott asztalok esetén:

Ha a láb, kéz vagy oldalsó vezérlő meghajtó nem működik, lehetséges, hogy a vezérlő-szekrény sérült.

Ha csupán egy meghajtó nem működik, valószínűleg a meghajtó hibásodott meg.

2. Kézi vezérléssel ellátott asztalok esetén:



Ha a kézi vezérlőn folyamatosan világít a jelzőfény, lehetséges, hogy a kézi vezérlő meghibásodott.

Ha a gomb megnyomásakor nem villan fel a jelzőfény a kézi vezérlőn, lehetséges, hogy sérült a kézi vezérlő vagy a vezérlőszekrény.




Bárminemű karbantartási művelet előtt húzza ki a tápkábelt a fali elektromos aljzatból.

► Lábvezérlő cseréje

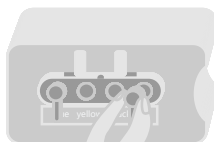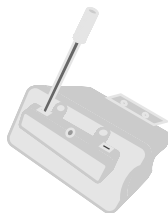


1. lépés: Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból és csavarhúzóval vegye le a vezérlőszekrény fedelét.
2. lépés: Húzza ki a rossz dugót a vezérlőszekrényből és szúrja be az új lábvezérlő dugóját.
3. lépés: Próbálja ki az új lábvezérlőt, ha működik, illessze vissza a szekrény fedelét.

Ellenőrizze, hogy a dugó be van-e dugva az aljzatba és a kábel mindkét vége csatlakoztatva van-e. Ellenőrizze a vezérlőszekrényt, a vezérlő kábelét és a lábvezérlő megfelelő csatlakoztatását a vezérlőszekrényhez.

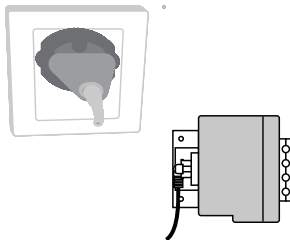


Kék barna rózsaszín

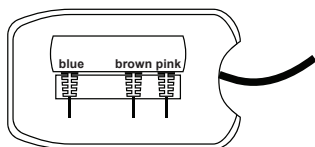

- * Kék port a magasság állításához
- * Barna port a mellkasi rész vezérlésére
- * Rózsaszín port a vezérlő lapáthoz

Ha az összes kábel csatlakoztatása megfelelő, az asztal azonban továbbra sem működik, nyissa ki a kábeltartó fedelét és válassza le a vezérlő kábelét a vezérlőszekrényről. Tartsa továbbra is lenyomva a lábvezérlőt és mérje meg multiméter segítségével a vezérlőszekrény csatlakoztató foglalatának kimeneti feszültségét. Ha a mért érték 29 V, azt jelenti, hogy a meghajtó hibás és ki kell cserélni. Ha a multiméter nem 29 V DC értéket jelez, valószínűleg a vezérlőszekrény vagy a pedál hibásodott meg.

multiméter

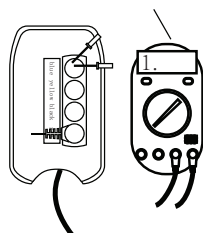

► Ha azt észleli, hogy a meghajtó hirtelen nem tud mozogni

- Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- Ellenőrizze az összes kábelt és szükség esetén rögzítse őket megfelelően.
- Vegyen le az asztalról minden tárgyat.
- Hagyja a rendszert áramtalanított állapotban 20 - 30 percig pihenni.

- * **Ha a probléma ezután is fennáll, lehet, hogy a vezérlő panel hibásodott meg.**



Ha más elektromos masszázs asztala van, a diagnosztikát elvégezheti a meghajtók, vezérlőszekrény és lábpedál cseréjével is.

Kérjük, vegye figyelembe! A pedáldugók cserélhetők. Ez azt jelenti, hogy helyettesítheti egy másik pedállal a rossz pedált a diagnosztika során.



A motoros egységre és vezérlőszekrényre a vásárlástól számított 2 év garancia érvényes. Lépjen kapcsolatba a termékforgalmazóval vagy a nagykereskedővel és kérje a szükséges pótalkatrészt, ha a fent ismertetett diagnosztika elvégzése után sem működik az asztal.

IV. fejezet: A kárpitozás ápolása

AZ ASZTALOK TERMÉKMINŐSÉGÉNEK ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁNAK MEGŐRZÉSE VÉGETT AZ ALÁBBIKBAN FELTÜNTETTÜNK PÁR MEGELŐZŐ LÉPÉST, AMELLYEK SEGÍTHETNEK AZ ASZTAL KÁRPITOZÁSÁNAK ÉS TARTOZÉKAINAK VÉDELMEBEN:

- Ne tegye ki az asztalt szélsőséges hideg hatásának, amelynek hatására megrepedezhet a kárpitozás.
- Ne tegye ki az asztalt szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak, mivel a túlzott hőhatások következtében megnyúlhat és gyűrődhet a kárpitozás. Mindig ellenőrizze, hogy asztala nincs-e hőforrások, elektromos berendezések közelében, valamint közvetlen napfény hatása alatt.
- Védje asztalát és annak tartozékait a lepedővel és takarókkal.
- Javasoltjuk az általunk forgalmazott Flannel Sheet Set-et és Fleece Sheet Set-et.
- Szórófejes palackba töltsön antibakteriális szappanos vizes oldatot. Fújja le vele az asztalt, majd törölje át tiszta, benedvesített törölkendővel.
- Használja az asztal mindkét végét. Időnként helyezze át a fejpárnát / fejrész toldást az asztal másik végére, hogy megakadályozza az asztal egyenetlen elhasználódását.
- Védje asztalát mindenféle vágástól, kopástól, sérülésektől.



- 1. Alkoholos szerek használata során kiszáradhat és ennek következtében megrepedezhet a vinil anyag.**
- 2. Ha a kárpitozás hosszú ideig szélsőséges hőhatásoknak van kitéve, károsodhat az anyag.**