



## Kozmetikai készülék 5in1 Elegante 1897

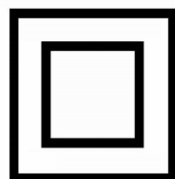

CE

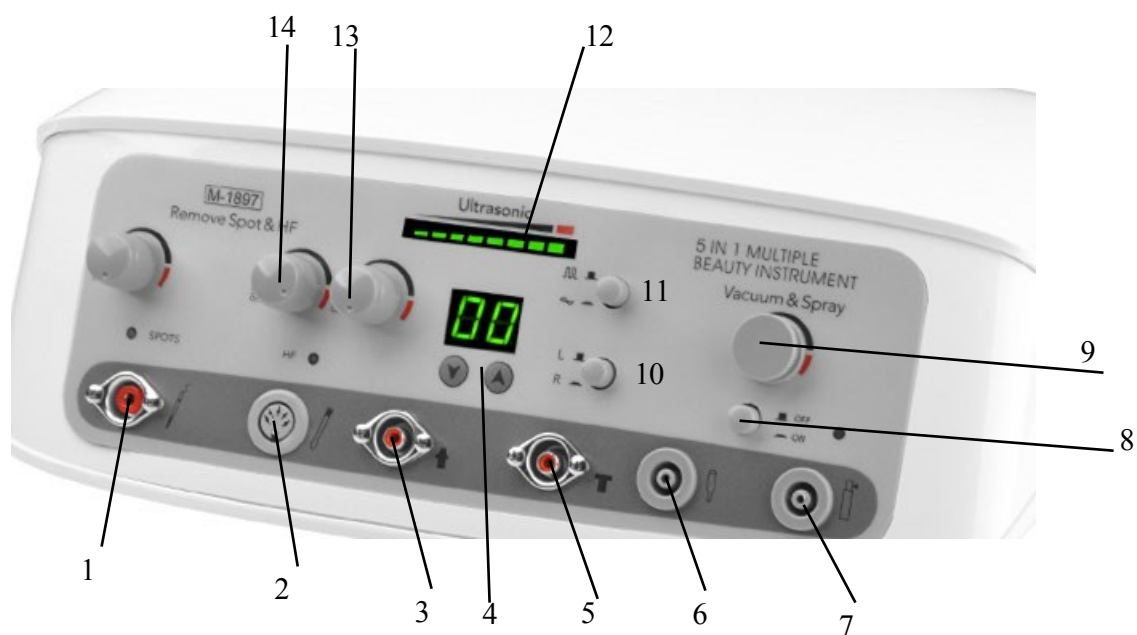

- ☐ Az elektrokoaguláció csatlakoztatása,
- ☐ Darsonvala kapcsolat,
- ☐ A fej csatlakoztatása az ultrahanghoz,
- ☐ Időbeállítás,
- ☐ A fej csatlakoztatása az ultrahanghoz,
- ☐ Vákuumegység és mikrodermabráziós csatlakozás,
- ☐ Permetezőcsatlakozás,
- ☐ A vákuumegység és a mikrodermabrázió be- és kikapcsolása,
- ☐ A szívóteljesítmény beállítása,
- ☐ Az ultrahangos kezelőfej kiválasztása,
- ☐ Az ultrahanghullám kiválasztása a kezeléshez,
- ☐ Ultrahang intenzitás kijelző,
- ☐ Ultrahang intenzitás beállítása,
- ☐ Darsonval intenzitás beállítása.

## DARSONVAL

A d'Arsonval-áramok a nagyfrekvenciás áramok egyik formája. A készülék az elektródákban (pelletekben) keletkező elektrosztatikus kisülések révén ózont termel.

A d'Arsonval-áramok hatása elsősorban az erekre és a vegetatív idegvégződésekre gyakorolt hatáson alapul. Az elektróda és a bőr között létrejövő szikrázás hatására az erek kitágulnak, és a bőr alatti szövetekre hatnak. A keletkező ózon fertőtlenítő hatású.

A kezelés 5-7 percig tart.

**Jelzések:**

- A bőr tisztulási zavarai,
- Alopecia areata (gyűrűsféreg),
- A vérkeringés serkentése,
- A bőr fertőtlenítése.

---

**ULTRAZVUK**

Ez egy olyan rendszer, amely a hatóanyagokat a bőr mélyebb rétegeibe szállítja. A készülék egy fizikai jelenséget használ, amely a sejtmembránokban zajlik az ultrahang hatására - ennek köszönhetően egyetlen kezelés hatása akár 72 órán keresztül is megmarad a bőrben.

A kezelés teljesen fájdalommentes, az ügyfél érzi a gyengéd rezgéseket, amelyek a fej.

---

**SPRAY**

A bőr kíméletes tonizálására használják egy tartályba helyezett vákuum és tonik segítségével.

---

**MIKRODERMABRÁZIÓ**

Ez egy olyan kezelés, amelynek során a bőr felszíni rétegeit gyémántcsiszoló fejek és szívóerő segítségével távolítják el.

A mikrodermabrázió hatékonyan csökkenti a finom vonalakat, a szem körüli ráncokat (szarkalábak), a pigmentfoltokat és az aknés hegeket. Serkenti a bőrsejtek és a kollagén termelését.

Ez egy nagyon népszerű nem invazív kozmetikai eljárás. Rendszeres alkalmazásával minden bőrtípus esetében kiváló eredményeket produkál. Az eredmények azonnal láthatóak.

**Jelzések:**

- Pattanásos hegek,
- Komedók (fekete pontok), miliák (fehér pontok),
- Kitágult pórusok,
- Durva, korrodált bőr,
- A bőr feszségének elvesztése,
- Megfiatalítja a bőrt és eltünteti a szem, a száj és a nyak körüli finom ráncokat,
- Strie,
- A bőr szárazsága,
- Pigmentfoltok és depigmentáció,
- A bőr (arc, kéz, nyak) napozás okozta károsodása,
- Keratosis a szőrtüszők körül,



**Ellenjavallatok**

- Vírusfertőzések,
- Bakteriális fertőzések,
- Gombás fertőzések,
- Gennyes és gyulladásos akne,
- Rosacea (rosacea),
- Szemhéjbőr,

- A bőr folytonosságának felszakadása (nyílt sebek),
- Bőrdaganatok és anyajegyek,
- Hemangiómák (barlangi érdaganatok),
- Pattanások kezelése Roaccutane-nal (legalább 3 hónapos szünet ajánlott),
- Keloid hegek kialakulására való hajlam,
- Sebészeti beavatkozások az arc területén (legalább 2 hónapos szünet ajánlott).

#### Figyelmeztetés:

- A mikrodermabráziós fejeknek tisztának és fertőtlenítettnek kell lenniük.
- A kezelést száraz bőrön végzik.
- A mikrodermabrázióhoz használt pamutszűrőket egyszeri használatra tervezték.
- Az eljárás során a fej mozgásának egyenletesnek és ellenőrzöttnek kell lennie.

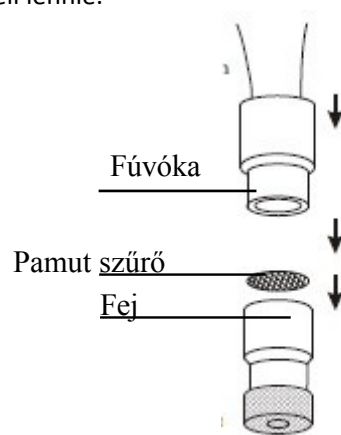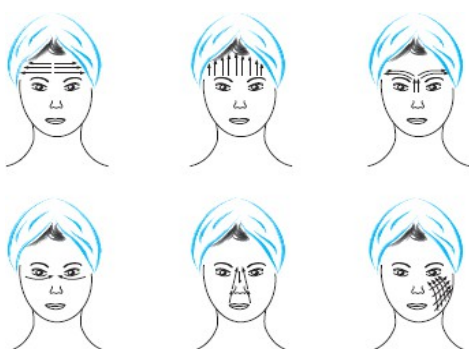

#### Vákuum

Ez egy olyan kezelés, amely szívóerőt és a kezelendő területnek megfelelően kiválasztott tartozékokat használ.

#### Jelzések:

- Comedones (fekete pontok)
- Kitágult pórusok,
- A bőr feszességének elvesztése,
- Strie
- A bőr szárazsága.



#### BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék egy professzionális készülék, amelyet szépségszalonokban való használatra terveztek. Kizárólag képzett kozmetikus személyzet kezelheti, ami segít megelőzni a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad a jelen használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő célra használni. Minden szervizelést és javítást csak erre felhatalmazott szerviztechnikus végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - hogy folyadék ne kerüljön a készülék belsejébe.

4. A következő esetekben azonnal le kell választani a készüléket a hálózatról, és kapcsolatba kell lépni a következőkkel  
hivatalos szerviz
    - a) folyadék került a készülékbe,
    - b) a készülék szokatlan szagokat, füstöt vagy hangokat bocsát ki,
    - c) a tápkábel sérült,
    - d) a készülék leesett vagy a burkolata megsérült.
  5. A kábelekre nem szabad tárgyakat helyezni. A berendezés nem helyezhető el olyan helyen, ahol a tápkábel becsíródhat.
  6. Biztonsági okokból a tápkábelt minden használat után ki kell húzni.
  7. A készülék nyílásaiba nem szabad semmit behelyezni. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, a kábelt azonnal ki kell húzni, és kapcsolatba kell lépni a forgalmazóval vagy a gyártóval.
  8. A berendezés nem helyezhető instabil kocsira, polcra vagy mozgó állványra. Leejtés esetén megsérülhet.
  9. A berendezés várható élettartamának biztosítása érdekében ajánlott legalább egy évenként egy percek a készülék be- és kikapcsolása között (és fordítva).
  10. A tápegységnek meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a hibás működés, a berendezés károsodásának vagy akár leégésének veszélye.
- 

#### MEGJEGYZÉS:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközpontoz - ezzel megelőzhető a veszély.
  2. Ezt a készüléket csak 8 éves kortól, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha eligazították őket a készülék biztonságos használatában, és megértették az ezzel járó kockázatokat.
  3. A készüléket nem gyermekeknek szánták játékokra. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
  4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy felügyelet nélküli személyek tartózkodnak a közelében.  
megfelelő ismeretekkel a használatáról.
  5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék nem megfelelő használata vagy a készülékkel való érintkezés egészség- vagy életveszélyt okozhat - ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tartani.
- 

#### BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos berendezéseket, tartozékokat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosítás céljából gyűjtőhelyekre kell vinni. Az elektromos berendezéseket nem szabad a kommunális hulladékba dobni.

Az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó hatályos előírásokat be kell tartani.

A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel összhangban a régi berendezéseket külön kell gyűjteni, majd az e-hulladék gyűjtőpontokon kell leadni.

A készülék még a hasznos élettartamának végén is tartalmaz újrahasznosításra alkalmas alkatrészeket, és azt újrahasznosító pontra kell vinni.

---

#### TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket -20 °C és +50 °C közötti hőmérsékleten csak eredeti csomagolásában szabad szállítani.

Jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a relatív páratartalom nem haladja meg a 75 %-ot. Az üzemi hőmérséklet +10 °C és +40 °C között van.

A tárolás és szállítás során a készüléket nem szabad leejteni, leejteni, mechanikai ütésnek vagy kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitenni.