


ACTIVESHOP[®]


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**ELEGANTE 882 BŐRRADÍR
+ DARSONVAL**

862 HF/M-882 modell

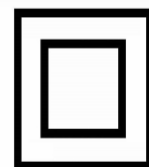

Műszaki adatok:

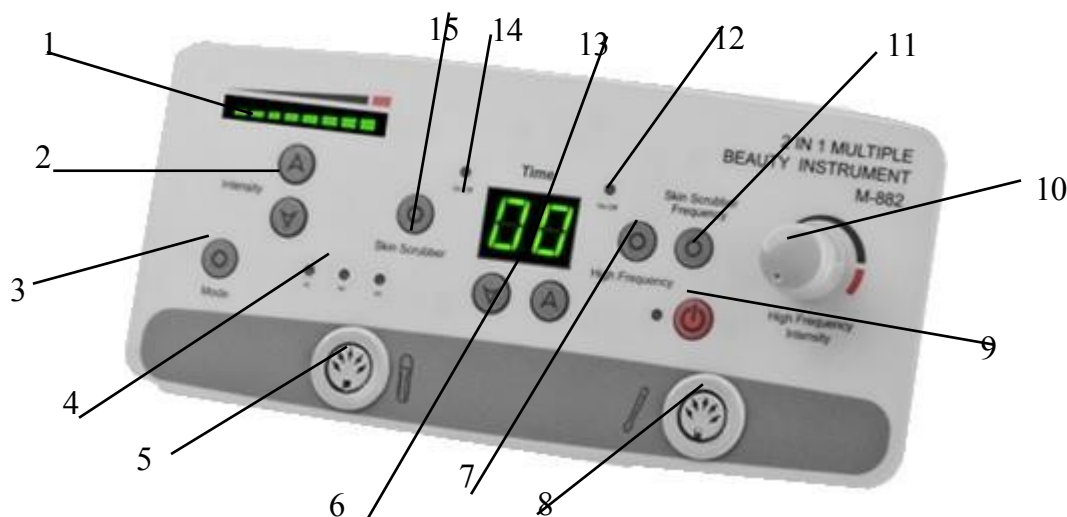

1. Intenzitásjelző
2. Intenzitás beállítása
3. A kavitációs hámlasztás kezelési lehetőségének kiválasztása (M1- kavitációs hámlasztás, M2- szonoferezis, M3- szonoferezis, M3- szonoferezis).
4. A megfelelő kavitációs peeling kezelési opcióhoz tartozó működési lámpa,
5. A kavitációs peeling csatlakoztatása,
6. Az üzemidő beállítása,
7. A kezelési lehetőség kiválasztása - darsonval,
8. A darsonval csatlakoztatása,
9. Darsonval/ kavitációs hámlasztás indítása/leállítása,
10. A darsonval intenzitásának beállítása,
11. A kavitációs hámlasztó spatula teljesítményének beállítása.
12. Fény a darsonval működéséhez
13. Időjelző
14. Fény a kavitációs hámozáshoz,
15. A kezelési lehetőség kiválasztása - kavitációs hámlasztás

DARSONWAL

A d'Arsonval-áramok a nagyfrekvenciás áramok egyik változata. A készülék a pelletekben fellépő elektrosztatikus kisülések segítségével állít elő ózont.

A d'Arsonval-áramok hatása elsősorban az erekre és a vegetatív idegvégződésekre gyakorolt hatáson alapul. Az elektróda és a bőr között létrejövő szikrázás az erek értágulását okozza, ami a bőr alatti szövetekre hat. A keletkező ózon fertőtlenítő hatású. A készülékben 3 pellet közül lehet választani. A kezelés 5-7 percig tart.

INDIKÁCIÓK:

- Bőrzérzékenységi zavarok,
- Alopecia areata,
- A keringési rendszer stimulálása,
- Bőrfertőtlenítés,

ELLENJAVALLATOK:

- Terhesség
- Hipertónia
- Ödéma
- Idegi hiperaktivitás
- Szívbetegségek
- Gyulladásos bőrbetegségek
- Láz
- Asztma

- Epilepszia
- Fém implantátumok
- Rózsacea
- Kitágult erek
- Allergiás bőrbetegségek

Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a darsonwala fogantyúját a 8-as bemenethez.
2. Állítsa be a kezelési időt a 6. gomb segítségével.
3. Nyomja meg a 7. gombot, a darsonwala készenléti lámpa (12) kigyullad.
4. Állítsa be a kezelés intenzitását a gombbal (10).
5. A kezelés megkezdéséhez nyomja meg a 9. gombot.

A **kavitációs hámlasztás** elsősorban a bőr fájdalommentes tisztítása ultrahangvibráció segítségével. Lehetővé teszi a pórusokból és a szőrtüszőkből a felesleges faggyú alapos eltávolítását, valamint a mitesszerektől való megszabadulást.

A peeling alkalmazásával a kavitáció jelensége játszódik le, amely akkor következik be, amikor az ultrahang folyadékkal érintkezik, majd mikroszkopikus gázbuborékok keletkeznek, és számos kémiai folyamat zajlik le, amelyek a szaruréteg elhalt sejtjeinek lebontását eredményezik.

INDIKÁCIÓK

- Az arc oválisának és az állnak a megemelése,
- A bőrszerkezet feszesebbé tétele,
- A felszíni ráncok kisimítása,
- A szem alatti "táskák" és a "szarkalábak" csökkentése,
- Kollagénrekonstrukció,
- Anti-aging terápia - megelőzés,
- A szennyeződések, kitágult pórusok csökkentése,
- A bőrszerkezet feszesebbé tétele.
- A bőr tisztítása.

Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a kavitációs hámlasztó spatulát az 5. bemenethez,
2. Válassza ki a kezelési időt a 6. gomb segítségével,
3. Válassza ki a kezelés típusát a 3. gomb segítségével,
4. Válassza ki a kezelés intenzitását a 2. gombbal (az intenzitásjelző megjelenik a kijelzőn 1.),
5. Nyomja meg a 15. gombot a kavitációs hámlasztási készségjelző lámpa (14) kigyulladására,
6. Nyomja meg a 9. gombot a kezelés elindításához.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtése esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel vagy egyéb meghibásodása esetén, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel, hogy elkerülje a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiányában tapasztalatlan személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft. részére kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Működési hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.