



## Használati utasítás

Fából készült összecusukható masszázstasztal  
Fabulo UNO, UNO Plus, GURU, GURU Plus,  
GURU Oval, DIABLO, DIABLO Plus, DIABLO Oval

Fabulo FERRO és TITAN összecusukható  
masszázstasztal fémből és alumíniumból



## Fontos tudnivalók

A termék nem megfelelő használata sérülésekhez vezethet. Olvassa el figyelmesen az összes utasítást

Az asztal kicsomagolása közben ellenőrizze a kárpitot. Ne használja az asztalt, ha látható a sérülés bármilyen jele (garanciánk nem terjed ki az asztal nem megfelelő összeszerelése, baleset, helytelen használat vagy a termék rendeltetésétől eltérő célú használata által okozott károkra).

**MAXIMÁLIS TERHELÉS** (beleértve az ügyfelet és a tartozékokat)

Maximális teherbírás: 204 kg

Statikus terhelhetőség: 1250kg



Mielőtt az ügyfél lefekszik az asztalra, győződjön meg arról, hogy az asztal megfelelően van szétnyitva, és nem dől el, különben az ügyfél elveszítheti az egyensúlyát és leeshet.

Kerülje a fejtámla vagy az asztal meghosszabbításainak túlzott terhelését vagy nyomását. Ne tegye ki a terméket nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.

Mivel a masszázstasztal nem játék, tartsa távol a gyermekektől és az állatoktól.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az agresszív fertőtlenítő spray-k károsíthatják a kárpitot. A fertőtlenítőszer használata által okozott károkra nem terjed ki a garanciánk (2 év korlátozott garancia a kárpitra).

### **A Fabulo kizárólagos forgalmazója:**

iM3 s.r.o., Kistejed u. 515/8, 929 01 Dunaszerdahely, Szlovákia

Web: [www.fabulo.hu](http://www.fabulo.hu), E-mail: [info@fabulo.hu](mailto:info@fabulo.hu), Tel: 0670 282 6028

## Használati utasítás a Fabulo masszázstasztalhoz

### Elrendezés

- Helyezze az összehajtott asztalt a gumi ütközőkre, és nyissa ki a zárat (1. ábra).
- Nyissa ki az asztalt, feszítse ki az asztal mindkét részét, amíg a lábakat ki tudja egyenesíteni és ki tudja venni a tartozékokat. A masszázstasztal akkor állítható fel, ha a lábak egyenesek, és a huzalok nem akadnak el sehol. (2. és 3. ábra)
- Fogja meg az asztal fogantyúit, támassza meg egyik lábát az asztal alsó lábán, és egy gyors mozdulattal állítsa az asztalt a lábaira úgy, hogy mind a négy lába a földön legyen. (4. ábra)

### Összetétel

- Fordítsa az asztalt az oldalára, ahol a gumi ütközők találhatók. (4. ábra)
- Helyezze vissza a tartozékokat a gumiszalagok alá, vagy rögzítse tépőzárral úgy, hogy ne tolja el az asztallábakat. Miután a huzalokat csatlakoztatta, és az asztallábak a helyükre kerültek, kezdje el az asztal két mozgó részét közelebb hozni egymáshoz, amíg az asztal össze nem záródik, majd rögzítse az asztalt a zárral. (3., 2., 1. ábra)
- Tegye vissza az asztalt a védőzsákba.



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra

### A fejtámla rögzítése

- Helyezze be a fejtámla csőszerrű függesztőit az asztal végén lévő lyukakba. Helyezze a beállító kart a helyére (5. ábra).
- Állítsa a fejtámlát a kívánt helyzetbe, és nyomja lefelé a kart a rögzítéshez (6. ábra).
- A fejtámla eltávolításához lazítsa meg a kart, és húzza ki a lyukakból (7. ábra).



5. ábra



6. ábra



7. ábra

## A kartámasz rögzítése

- Fűzze át a csőszerű fejtámla pántokat a kartámla hurkán (8/1 1. ábra).
- Csúsztassa a fejtámlát az asztalba, és rögzítse a tépőzáras pántot a fejtámla tetejére az ábrának megfelelően (9/12. ábra).
- Helyezze a párnát a fejtámlára (10/13. ábra).



8. ábra



9. ábra



10. ábra



11. ábra



12. ábra



13. ábra

## Az asztalmagasság beállítása

- A Ferro fa vagy fém masszázstasztal magasságának beállításához csavarja ki az egyes lábakon lévő csavarokat, állítsa be a kívánt magasságot és húzza meg a csavarokat (14., 15. ábra).
- Ha az alumínium masszázstasztal magasságát szeretné beállítani, válassza ki a kívánt magasságnak megfelelő lyukat. Az asztal leengedéséhez vagy felemeléséhez nyomja meg a lábon lévő reteszt. (16. ábra)
- Az asztal használata előtt győződjön meg arról, hogy az asztal minden lába azonos magasságba van-e állítva!



14. ábra



15. ábra



16. ábra

## A huzalok kioldásának lehetősége a Shiatsu számára

- Távolítsa el a műanyag borításokat, lazítsa meg és távolítsa el az anyákat a huzalok meglazításához (17. ábra).
- Távolítsa el a huzalokat az asztallábakról (18. ábra).
- Tegye a lábakat az asztal belsejébe, és helyezze az asztalt közvetlenül a padlóra (19. ábra).



17. ábra



18. ábra



19. ábra

## Lábtartó/háttámla beállítása


Kövesse az alábbi lépéseket, ha az összecukható masszázstasztal állítható háttámlával van felszerelve. (20., 21. ábra).

### A háttámla felemelése

Emelje fel a háttámlát az asztal tetejétől felfelé tolvá, amíg el nem éri a kívánt pozíciót (segít, ha az ügyfél nem támaszkodik a háttámlára, miközben felemeli azt).

### Háttámla leengedése

Egyik kezével támassza meg az ügyfél hátát és súlyát. Emelje fel a háttámlát a legmagasabb pozícióba, majd engedje le (segít, ha az ügyfél nem támaszkodik a háttámlára, miközben leengedi) (20., 21. ábra).

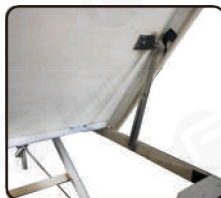

20. ábra



21. ábra


## Arclýuk kivágás dugóval

- Távolítsa el a dugót az asztal felületéről (22. ábra).
- Ha az ügyfél az arclýuk kivágásba helyezi, győződjön meg róla, hogy szabadon lélegzik a lyukon keresztül.
- Ha nincs szükség az arclýuk kivágásra, helyezze ele a dugót.



22. ábra

## Mellékelt tartozékok

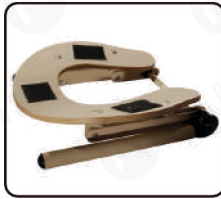

Fejtámla



Memóriahabos párna



Elülső kartámasz



Elülső kartámla (csak az Oval asztaloknál)



Oldalsó kartámaszok - 2x  
(csak UNO asztalok)



Táska

## Kárpitozás ápolása

A termék hosszú élettartamának, valamint a kárpit és a tartozékok minőségének megőrzése érdekében javasoljuk, tartsa be a következő óvintézkedéseket:

- Ne tárolja az asztalt rendkívül hideg környezetben, mivel a túlzott hideg miatt az asztal kárpitja megrepedhet. Hideg időben ne tárolja az asztalt fűtetlen helyiségben.
- Ne tegye ki az asztalt szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak, mivel a túlzott hőhatások következtében megnyúlhat és gyűrődhet a kárpitozás. Mindig ellenőrizze, hogy asztala nincs-e hőforrások, elektromos berendezések közelében, valamint közvetlen napfény hatása alatt.
- Védje asztalát és annak tartozékait lepedővel és takarókkal. Javasoltjuk az általunk forgalmazott Flannel Sheet Set-et és Fleece Sheet Set-et.
- Tisztítsa meg a kárpitot minden nap. Javasoljuk, hogy a tisztítást enyhe, vinilre alkalmas tisztítószerrel végezze (pl. Incidin Foam, Sani-Cloth Active), hogy megóvja asztalát az olajfoltoktól és a szennyeződésektől, melyek repedéseket és maradandó elszíneződést okozhatnak.

Szórófejes palackba töltsön antibakteriális szappanos vizes oldatot. Fújja le vele az asztalt, majd törölje át tiszta, benedvesített törülközővel.

- Használja az asztal mindkét végét. Alkalmanként rögzítse a fejtámlát az asztal másik végéhez, hogy elkerülje az egyenetlen használatot.
- Védje az asztalt a horzsolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.



1. Alkoholos szerek használata során kiszáradhat és ennek következtében megrepedezhet a vinil anyag.
2. Ha a kárpitozás hosszú ideig szélsőséges hőhatásoknak van kitéve, károsodhat

## Biztonsági útmutatások

Évente ellenőrizze az összes csatlakozást és huzalt.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, amennyiben a biztonsággal kapcsolatos kopás bármilyen jele mutatkozik.

A termék jogosulatlan módosítása vagy átalakítása tilos, és ennek következményeképp a garancia érvényét veszti.

Köszönjük, hogy megvásárolta masszázstasztalunkat!

Cégünk folyamatosan tökéletesíti és fejleszti az új termékeket ügyfeleink igényeinek megfelelően.

Masszázsasztalaink szigorú anyagválasztása, a szakértelem, a vásárlás utáni szerviz, valamint a versenyképes ár teszik lehetővé ügyfeleink számára, hogy érezzék a valódi élet érintését.