


# Használati útmutató a Fabulo Spa Harmony 301 (MWC-10318-67) kezelőágyhoz

Gratulálunk az új kezelőágya vásárlásához. Az új asztalt gondosan készítették el a szigorú szabványoknak megfelelően, magas minőségű alkatrészek és anyagok felhasználásával. Megfelelő használat és gondoskodás esetén, amelyet ebben a felhasználói kézikönyvben ismertetünk, az asztala hosszú távon megbízható teljesítményt nyújt. A masszázstasztal biztonságos és megfelelő használatának biztosítása érdekében kérem, olvassa el a teljes kézikönyvet a termék használata előtt.

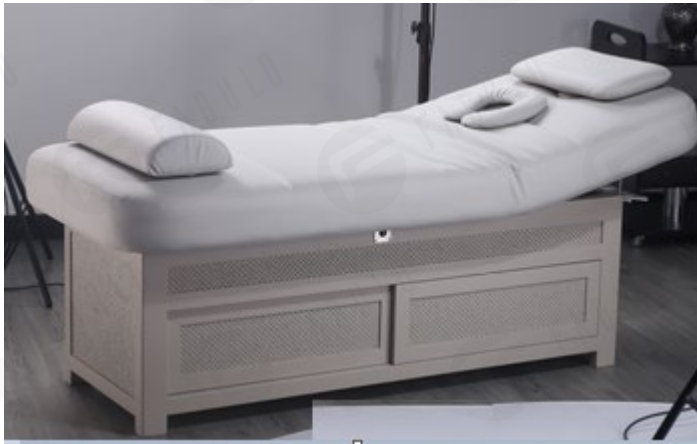

MÉRET: 190\*81\*67 cm, 16 cm vastag szivaccsal  
Alap: Fa alap, mindkét oldalon tolóajtóval

## MEGELŐZÉSI UTASÍTÁSOK

- (1) Rendszeresen tartsa karban az asztalt. Győződjön meg róla, hogy minden csavar szorosan van meghúzva. Ellenőrizze, hogy nincsenek repedések a fa szerkezetben.
- (2) Ne terhelje túl az asztalt a javasolt súlyhatáron felül. Ez súlyos sérülést okozhat a felhasználónak.
- (3) Ne használjon vegyszereket a krómozott váz tisztításához. Ez károsíthatja a krómozott felületet. Használjon hideg vizet és szárítsa meg.
- (4) Használat közben győződjön meg róla, hogy az alapja szilárd felületen van és azonos szinten helyezkedik el.

## Az asztal előkészítése

### Összeszerelés nélküli telepítés


Nyissa ki a dobozt, távolítsa el az összes csomagolási anyagot, vegye ki és szerelje össze az ágyat. Ezután az ágyat közvetlenül használhatja.

A szükséges tartozékokat biztosítjuk Önnek. Kérjük, hogy a használat előtt gondosan olvassa el az utasításokat.

**Fejpárna:** A fejpárna kényelmes fejtámogatást nyújt ügyfelének. Elhelyezheti az arcnilyásban.



Fejpárna

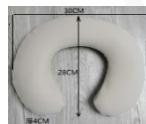

Arcpárna



Dugó



Félhenger

### Arcpárna:

Az arcpárna kényelmes támaszt nyújt ügyfelének, amikor háton fekszik a masszázs során vagy arccal lefelé fordítva. Hatékonyan megakadályozza az arcon lévő nyomásfoltok kialakulását.

### Dugó az arclyuk kivágásba:

Amikor nincs szükség az arclyuk kivágásra használhatja annak lezárására.

### Félhenger

A félhenger kényelmes támaszt nyújt ügyfelének a térdei alá.

### Háttámla beállítása:

Többlépcsős kézi beállítás két vascsapal a háttámlán.

### Fűtésrendszer:

Az ágy fűtésrendszerrel van ellátva. Dugja be a tápkábel, és kapcsolja be az ágy oldalán található vezérlőkapcsolót. Az ágy fűtőrendszere kb. 20 másodperc alatt kezdi melegíteni az ágyat.



Lekapcsolás



Gyors szint



Lassú szint

### Az ágy terhelhetősége:

Az ügyfél elhelyezése az ágy közepére segít egyenletesen elosztani a súlyt és biztosítja az ágy stabilitását. Kezdetben üljön le óvatosan közel az ágy közepéhez, majd üljön be a lehető legközelebb az ágy közepéhez (az élettől távol). A munkasúly az ügyfél súlyát és a terapeuta által kifejtett maximális függőleges nyomás mennyiségét kombinálja. Például: Egy 120 kg-os ügyfél esetében az ágy maximális munkasúlya 80 kg, a maximálisan biztonságos függőleges nyomás pedig 200 kg. Mivel az oldalsó szög alatt kifejtett nyomás sokkal nagyobb terhelést jelent az ágyra, az oldalsó nyomás nem haladhatja meg a maximális függőleges nyomás 50%-át. Ajánlott súlyhatár: Max. 150 kg.

**MAXIMÁLIS MUNKASÚLYT** (Soha ne haladja meg az ágy terhelhetőségének határértékét, ez súlyos sérülést vagy károsodást okozhat).

### Tárolás:

Használat után minden tartozékot helyezzen vissza eredeti helyére.

### A kezelőágy gondozása

#### Bútorhuzat gondozása

**Napi tisztítás:** Távolítsa el a mindennapi szennyeződések és szennyeződések az ágyból enyhe szappannal és langyos vízzel, majd szárítsa meg egy puha szőrtelen kendővel.

**Fertőtlenítés:** A szükség szerint fertőtlenítse az ágyat olyan izopropil-alkoholon alapuló fertőtlenítő tisztítószerrel, amely kórházi használatra szolgál (vinil poliuretán alapanyagokra engedélyezett).

**Foltok eltávolítása:** Néhány kisebb folt eltávolítható enyhe nem-abrazív tisztítószerrel. Spricelje a tisztítószert egy nedves rongyra, majd óvatosan törölje le a foltot, alaposan öblítse le langyos vízzel, és szárítsa meg egy puha szőrtelen kendővel. A makacsabb foltok esetén szakemberrel való tisztításra lehet szükség.

**Megjegyzés:** Soha ne használjon éles vagy abrazív tisztítószereket vagy vegyszereket az ágy tisztításához. Ez károsíthatja a bútorhuzatot. Kerülje az összes védőanyag használatát, mert ezek károsíthatják a huzatot.

Tartsa szárazon az ágyat, és kerülje a nedves vagy párás környezetnek való kitétséget. Ha az ágy nedves lesz, gyorsan és alaposan szárítsa meg egy puha ronggyal.