

Használati utasítás

Silverfox F-805 galvanizáló készülék



Tartalom

1. Bevezető	3
1.1 Információk az útmutatóról	4
2. A csomag tartalma	5
2.1 A csomag tartalma	5
2.2 Karbantartás és telepítés	5
2.3 Műszaki adatok	5
3. Felhasználási cél	6
3.1 Használat	6
3.2 Biztonsági utasítások	7
4. Hibaelhárítás	8
4.1 Tisztítás és karbantartás	8
4.2 Lehetséges hibák	8
4.3 Hulladékmegsemmisítés	8

Bevezető

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Csapatunk alaposan ellenőrizte minden termékünk minőségét a szállítás előtt.

Tájékoztatjuk, hogy minden termékünkre két év garanciát vállalunk. A számla az Ön jótállási jegyeként szolgál.

Ha további információt szeretne, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba csapatunkkal. Kérését azonnal feldolgozzuk.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül technikai módosításokat hajtson végre a műszereken. Ha bármilyen hibát talál ebben a kézikönyvben, kérjük, értesítsen minket e-mailben, hogy kijavíthassuk azokat.

Tisztelettel

a Mimera csapata

1.1 Információk az útmutatóról

A termék biztonsági eszközökkel van felszerelve. Ennek ellenére gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, és a terméket csak az abban leírt módon használja. Ez megakadályozza a véletlen sérüléseket vagy károkat.

Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja egy másik felhasználónak, akkor ezt a kézikönyvet is át kell adnia a termékkel együtt.

Szimbólumok:



Ez a szimbólum a sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a szimbólum az áramütés veszélyére figyelmeztet.

A VESZÉLY figyelmeztető szó a lehetséges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet. A FIGYELMEZTETÉS szó figyelmeztet a lehetséges sérülésekre és súlyos anyagi károokra. A FIGYELEM szó figyelmeztet a lehetséges kisebb sérülésekre vagy károokra.


2. A csomag tartalma és szerkezete

2.1 A csomag tartalma

A galvánáram alkalmazásával az iontoforézis lehetővé teszi, hogy a hatóanyagok célzottan behatoljanak a bőrbe. Javítja a vérkeringést, a szövetközi anyagcserét, a bőr felszívóképességét, aktiválja a regenerációs folyamatot és növeli a bőr hidratáltságát.

Pozitív és negatív áramok alkalmazásával mély bőrkezelést és a pozitív töltésű hatóanyagok bőrön keresztüli felszívódását érheti el. A galvánáramot olyan speciális kezelésekhez használják, amelyek frissítik és tonizálják a bőrt, és a leghatékonyabb kozmetikai hatóanyagfelszívódást biztosítják.

Mennyiség	Rész
2	Galvanizáló kézi eszköz
1	Kábel
1	Tápkábel
1	Központi egység

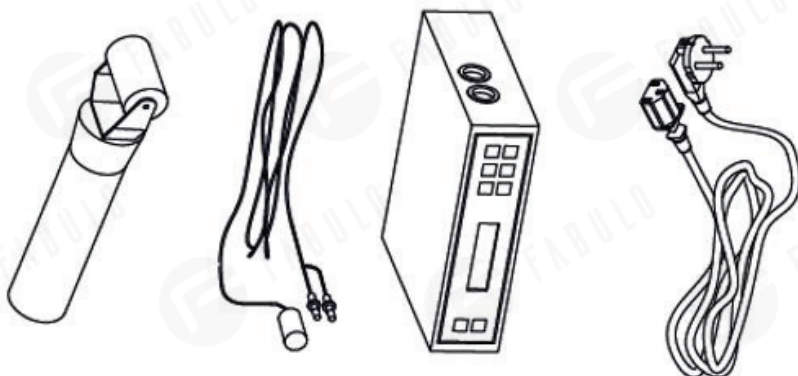

2.2 Karbantartás és telepítés

1. Dugja be a kábelt a készülék hátuljába.
2. Csatlakoztassa megfelelően a tartozékokat elöl és hátul.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Szükség szerint állítsa be a kimeneti intenzitást. Először alacsony intenzitással kell kezdeni, és szükség szerint növelni.
5. Tartsa erősen a szondát, és nyomja meg a „START/PAUSE” gombot az indításához.

2.3 Műszaki adatok

Súly	Magasság	Hossz	Hz	Szélesség	Teljesítmény
2,2 kg	13 cm	25 cm	50/60	25 cm	3 W



3. Felhasználási cél

3.1 Használat



Veszély gyermekekre nézve.

Tartsa a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen.



Életveszélyes áramütés.

A kezelés előtt:

1. Tisztítsa meg és szárítsa meg a kezelt területet.
2. Az ügyfél tartja a fémrudat, a kezelő személy pedig a henger fogantyúját.
3. A szondák polaritásának megváltoztatásához a "LEAD" gombbal a következő pozíciók között kell váltani (+R) és (-G).
4. Fedje le a hengert egy darab pamut kendővel, amelyet előzőleg megfelelő szérumba vagy emulzióba áztatott. A szérum vagy emulzió közvetlenül a kezelendő bőrfelületre is felvihető.

Figyelem!

- Ne használja a készüléket terhes nőknél!
- Ne használja a készüléket pacemakerrel (vagy más elektromos vagy ritmusszabályozó eszközzel) rendelkező személyeken.
- Ne használja a készüléket olyan személyeknél, akiknek igazolt szívproblémái vannak, trombozisan szenvednek, bőrproblémákkal küzdenek vagy szilikonimplantátumokat viselnek.
- Ne használja a készüléket olyan személyeken, akiket 6 hónapnál nem régebben műtöttek.

Kezelés:

1. Tisztítsa meg az ügyfél bőrét.
2. Adjon át az ügyfélnek egy fémrudat.
3. Dugja be a kábelt a készülék hátuljába.
4. Csatlakoztassa helyesen a tartozékokat a készülék oldalára.
5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Végezze el a bőrkezelést.

A pozitív pólus/anód nyugtató hatású galvanizálást eredményez

A negatív pólusú/katódos galvanizálás serkentő hatású

3.2 Biztonsági utasítások



A berendezés működtetése gyermekek és csökkent képességű személyek számára veszélyes.

- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek vagy olyan személyek, akik szellemi, érzékszervi vagy értelmi képességeik, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket, és ne engedje, hogy a készülékkel játszanak.
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és a csomagolóanyagtól!
Áramütés veszélye!
- Soha ne merítse a dugót és a csatlakozókábelt vízbe - fennáll az áramütés veszélye. Ne használja a készüléket kültéren.
- Soha ne hagyja a készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül.
- A készüléket csak olyan védőérintkezőkkel ellátott konnektorba csatlakoztassa, amely az előírásoknak megfelelően van felszerelve. Ezen érintkezők hálózati feszültségének meg kell egyeznie a készülék műszaki adataival.
- Ne használja a készüléket, ha a készülék, a tápkábel vagy a dugó sérült. Ne használja a készüléket, ha az leesett.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken vagy a tápkábelen. A veszély elkerülése érdekében a javításokat csak szakszervizben vagy szakképzett személy által végeztesse el.
- A készülék áthelyezése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Győződjön meg róla, hogy az elektromos dugó jó állapotban van, és közvetlenül a konnektorba van dugva. Kerülje a több konnektoros vezetékek (hosszabbítók) használatát.
- Soha ne csatlakoztassa vagy válassza le a készüléket nedves kézzel vagy a tápkábelt a konnektorból kihúzva.
- Soha ne használja a készüléket nedves vagy fülledt környezetben, például nedves helyiségben vagy fürdőszobában. Ez megakadályozza a készülék elektromos alkatrészeinek károsodását.
- Ne helyezze át a készüléket a tápkábel rángatásával.
- A kezelés után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.

Figyelmeztetés

- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket kültéren - az időjárási hatások kárt okozhatnak.
- A munka után a szondákat meg kell tisztítani, sterilizálni és száraz helyen kell tárolni.
- Ne használjon savakat vagy lúgos anyagokat tartalmazó anyagokat a készülék működtetésekor.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a szondákat/görgőket - túlhevülhetnek.
- Ne próbálja meg leválasztani a rozsdamentes acél generátort a gumitartóról. Ez a generátor helyrehozhatatlan károsodásához vezethet.
- Győződjön meg arról, hogy az ügyfél eltávolította az ékszereket a testéről, és nincsenek fémimplantátumok a testében.
- Ez a kezelés nem alkalmazható terhes nőknél, duzzadt vagy érzékeny bőrű, tágult erekkel rendelkező személyeken, valamint túlérzékeny bőrű vagy allergiás személyeken.
- Gondoskodjon arról, hogy a bőr a kezelés alatt nedvesen maradjon.

A készüléket olyan helyen tárolja, ahol a gyerekek nem férnek hozzá.

4. Hibaelhárítás

4.1 Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés! A készülék károsodhat vagy megsérülhet a szennyeződésektől

Vigyázzon, hogy a görgők/szondák ne sérüljenek meg. Ne használjon durva tisztítószereket. A sérült hengerfelületek a kezelés során karcolásokat okozhatnak a bőrfelületen. A karcos területeken baktériumok telepedhetnek meg, és megnehezíthetik a sterilizálást. A kezelés után a henger minden fémrészét meg kell tisztítani, fertőtleníteni és megszáritani. Ezeket a görgőket a tartozékdobozban tárolja, hogy biztosítsa védelmüket.

Megjegyzés:

- Ügyeljen arra, hogy a készüléket mindig vízszintes és sík felületen tárolja.
- A készüléket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. Ellenkező esetben meghibásodások lépnek fel.

4.2 Lehetséges meghibásodások

Hiba	Lehetséges oka	Megoldás
A készülék nem reagál	<ul style="list-style-type: none">• A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva• Az áramellátás megszakadt, pl. áramszünet miatt.	Húzza ki a dugót, majd dugja vissza.
A szonda görgői nem forognak.	Nem megfelelő tisztítás	Szerelje le a görgőket és tisztítsa meg őket megfelelően.

4.3 Hulladékeltávolítás

Mind a készülék, mind a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült.

Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolást elkülönítve kell megsemmisíteni. Használja ki a helyi szelektív gyűjtési lehetőségeket a papír, a karton és a könnyű csomagolóanyagok esetében.



Az ezzel a szimbólummal jelölt eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Az Ön törvényi kötelezettsége, hogy a használt készülékeket és berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa. Ezt a hulladékot ingyenesen elviheti egy gyűjtőhelyre. További információért forduljon az önkormányzathoz vagy a helyi hatósághoz.