

### Figyelmeztetés

1. Ha a készüléket át szeretné helyezni, óvatosan emelje fel és óvatosan tegye le; meghibásodás esetén kérjük, ne ütögesse keményen, hogy elkerülje az ütés okozta meghibásodást.
2. A készülék áthelyezésekor vízszintesen kell tartani a rezgések és ütések elkerülése érdekében.
3. Ne nyomja a készüléket, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, hogy elkerülje a burkolat deformálódását, sérülését vagy meghibásodását.
4. A megfelelő üzemi tápellátást a készüléken található jelöléseknek megfelelően kell kiválasztani.
5. Ezt az eszközt nem szabad a fürdőszobában használni.
6. A villámcsapás elkerülése érdekében mennydörgéskor kapcsolja ki a kapcsolóval, és húzza ki a hálózati dugót az aljzatból.
7. A műszer testébe nem szabad folyadékot fecskendezni, hogy elkerülhető legyen a műszer rövidzárlat miatti károsodása.
8. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, ki kell húzni a hálózati dugót a konnektorból.

### Műszaki paraméterek

1. Üzemi feszültség: AC 220V--AC 240V
2. A készülék maximális teljesítménye: 25W
3. Csomag mérete: 26.5\*14\*22.5 (L\*H\*Sz) cm

# SMART 671

## Kozmetikai készülék

## Használati útmutató



Kedves Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy biztosítsa a készülék maximális teljesítményét és biztonságát a használat során. Kérjük, őrizze meg későbbi használatra is.

## Funkciók

### ※ Ozonizátor

1. A kezelés során ózonrészecskék szabadulnak fel - ez fertőtleníti és stimulálja a bőrt.
2. Megszabadít a foltoktól, pigmentációtól, kiütésektől és pattanásoktól.

### ※ Galvanizáció


1. Szabadjon meg minden szennyeződéstől, zsírtól a bőr mély pórusaiból.
2. Táplálja a bőrt és javítja a bőr állapotát.

J

## Specifikáció

1. Egyszerű és gyors működés a legújabb mikroszámítógépes technológiával
2. Intelligens és megbízható kezelés 10 állítható szinttel
3. Az impulzushullámmal elérhető különböző módszerek

## Vezérlő panel bemutatása

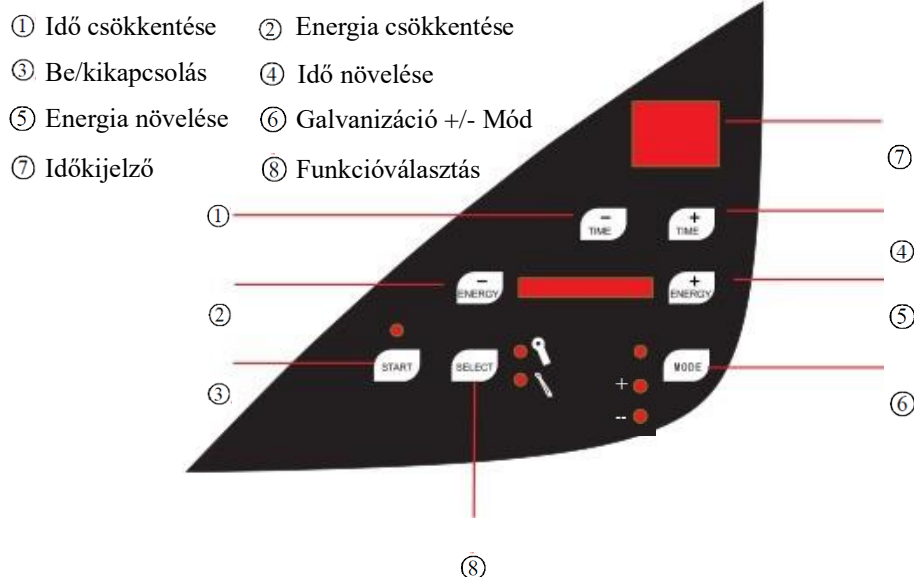

## Üzemeltetés

### ※ Ozonizátor

1. Az energia nem lehet túl magas a sérülések megelőzéséhez, és nem lehet túl alacsony a kezelés eredményének gyengítéséhez.
2. A folt eltávolításához húzza át az elektródát a folton, Ekkor látható, hogy a melanin fakul. A kisebb foltok egy kezelés után eltávolíthatók, a nagyobbak 2-3 kezelést igényelnek.

### ※ Galvanizáció

1. Helyezze a negatív fémrudat az ügyfél kezébe.
2. Használjon iondiszociációra megfelelő ampullát az ügyfél bőrén.  
Ezután gézzel nedvesítse be az arcot vízzel az iontoforézishez. (A benedvesített géz a kezelés alatt az ügyfél arcán marad.)
3. Helyezze a galvanizáló elektródát az ügyfél homlokára:
4. Nyomja meg a ⑥ -t és válassza a "+" -t az elvezetéshez / a "-" -t a betöltéshez
5. Növelje/csökkentse az energiát 10 szinten a ⑤ / ② gombok lassú megnyomásával, kezelési idő kb. 4-6 perc.
6. A kezelés után kapcsolja ki a készüléket, és vegye le a galvánfejet az ügyfélről.

### ※ Üzembe helyezés

1. Dugja be az aljzatba, ⑦ a kijelzőn 30 (perc) jelenik meg, és a második pont villog.
2. A Nagy frekvencia / Galvanizáció kiválasztásához nyomja meg a ⑧ -t.
3. A ① / ④ gombbal állítsa be az üzemi időt.
4. A ⑤ / ② gombbal állítsa be az energiát.
5. Nyomja meg a "+" gombot az elvezetéshez / a "-" gombot a betöltéshez ha a galvanizálás be van kapcsolva.

## Megjegyzések

1. Ha a kozmetikus sterilizált kesztyűben végzi a beavatkozást, a kezét először tisztítsa meg és fertőtlenítsa alkohollal.
2. Az elektródákat sterilizálni kell, tisztán és szárazon kell tartani, és a fogantyúkhöz kell rögzíteni.
3. A kezelés előtt fertőtlenítsa az ügyfél kezelt testrészét alkohollal.
4. 3 percig dörzsölje be ezt a részt érzéstelenítővel, majd kezdje el a kezelést.
5. Ne maradjon túl sokáig a kezelt területen a kezelés alatt, hogy elkerülje a hegeseledést.
6. Kezelés előtt vegye le a fém ékszereket (fülbetvaló, nyaklánc stb.)