

Használati útmutató

Elegante 857 Kozmetikai ultrahangos spatula

M-857A



A bőrtisztítási művelet ismertetése

Cél: hámlasztás és a bőr egyensúlyának fenntartása.

Bevezetés az üzemeltetésbe	
Tartozék	1 bőrtisztító
1. üzemmód Tisztítás (10 perc)	Miután 5 percig alkalmazta az exportfolyadékot az arcon, döntse a szondát 45 fokban előre, hogy eltávolítsa az elhalt bőrt, törölje át az arcot nedves vattapamaccsal, hogy az arcot nedvesen tartsa az kezelés során, ismételje meg a tisztítást ugyanazon a helyen legfeljebb 3-szor, hogy elkerülje a bőrpírt, ne tartsa ugyanazon a helyen a szondát mozdulatlanul, különben megégetheti az ügyfelet.
2. üzemmód Import (5 perc)	Az arcra vizes emulziót, gélt vagy esszenciát lehet felvinni, a bőrtisztítót 45 fokban döntse meg, hogy visszahúzza, majd lenyomja a bőrt, ismételje meg a műveletet.
3. üzemmód Lifting (5 perc)	Vigye fel a gélt az arcra, helyezzen nedves gézt a bőrre, és 45 fokos szögben döntse meg a bőrtisztítót, hogy visszahúzza a bőrt.
Termék elhelyezése	Bőrápoló, összejtes esszencia, aloe vera gél, bőrelénkítő gél stb.

Biztonsági óvintézkedések

- Használat előtt ne feledje ezeket az utasításokat és a használati módot.
- Ha használat közben kellemetlenül érzi magát, vagy bármi szokatlant észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és hagyja abba a használatát.
 - Kérjük, ne használja csecsemőkön, és olyan helyen tárolja, amely a kisgyermek számára nem hozzáférhető.
 - A terméket a műszaki személyzetünkön kívül más nem szerelheti szét vagy módosíthatja.
 - Használat után mindig húzza ki a dugót
 - Ne tárolja a következő helyeken:
 - ① A szélnek, esőnek kitett helyek és olyan helyek, ahol a víz könnyen összegyűlik.
 - ② Tűz közelében, egyéb magas hőmérsékletű helyeken.
 - ③ Nedves és poros környezetben.
 - Ne rongálja meg vagy módosítsa a tápkábelt. Ha a tápkábel megsérült, azonnal cserélje ki.
 - Használat közben tartsa be a készülék előírt feszültségét. Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
 - A termék kezelőpaneljébe kerülő víz áramütést és rövidzárlatot okozhat. Azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon szakemberhez, aki megvizsgálja.
 - Ha nem használja, először kapcsolja ki az alapegységet, majd kapcsolja ki a készüléket. Győződjön meg róla, hogy kihúzta a dugót a konnektorból. Egyidejűleg tisztítsa meg a tartozékokat.
 - Amikor elkezdi használni, ne állítsa túl magasra az intenzitást. Alacsony intenzitással kezdje használni.
 - Ha a bőr kipirosodik vagy viszket, hagyja abba a használatát, és derítse ki az okot.
 - ① A készülék sérülésének elkerülése érdekében nem szabad erősen megütni, vagy a padlóra ejteni.
 - ② A készülék használatakor a tartozék nem kerülhet túl közel a szemhez, és nem haladhat át a szemgolyón. Terhes nők és szívbetegek nem használhatják a készüléket.