

**SMART 627II kozmetikai készülék  
– Ultrahang és elektrokoagulátor**



Megjegyzés: A készülék használata előtt kérjük, olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

## Tartalom

A 2in1 ultrahangos kozmetikai készülék működési mechanizmusának összefoglalása .....	1
Gyógyító és szépszézi kezelések a 2in1 ultrahangos kozmetikai készülékkel .....	1
A 2in1 kozmetikai készülék kezelőpaneljének utasításai .....	2
Útmutató a 2in1 ultrahangos kozmetikai készülék vezérlő-paneljéhez .....	3
Biztonsági óvintézkedések .....	4
Felhasználási ellenjavallat .....	4
A 2in1 ultrahangos kozmetikai készülék műszaki indexe .....	5

## A 2in1 kozmetikai ultrahang készülék műszaki indexe

1. A tápfeszültség frekvenciája: 50Hz~60Hz;
2. Működési időtartomány: 1-30 perc;
3. A kimeneti teljesítmény esetében a kijelzett számnak 10 szintje van, amelyek közül négy szint zöld, három szint sárga és három piros.;
4. Kimeneti teljesítmény: 25W;
5. Kimeneti modulációs impulzusfrekvencia: 1MHz;
6. Bemeneti tápfeszültség: 220V.

## Amire figyelni kell

### 1. A műszer működtetése

- 1) A készülék használata előtt a panelt (vagy az érintett részt) meg kell tisztítani..
- 2) Az alkalmazott terápiás szer viszkozitása alkalmas a bőr általi felszívódásra a munkafejvel együttműködve. A munkafej égésének megelőzése érdekében a bőrön hatékony kezelőanyagokat kell alkalmazni..
- 3) A működési idő általában 15 perc, meghosszabbítása nem növeli a hatást.
- 4) Azoknál a felhasználóknál, akiknél kis területet kell kezelni, egy kis szondát kell használni, és a műveleti időt 8-10 percre csökkenteni.
- 5) Ügyeljen arra, hogy a szuperszonikus fej ne kerüljön a szemkörnyék közelébe, és ne érintkezzen a szemmel.
- 6) Szigorúan tilos más műveleteket végezni, miközben a szuperszonikus munkafej energiát bocsát ki, hogy megakadályozza a munkafej túlhevülés miatti kiegészését. A munkaidő nem haladhatja meg a 15 percet.

### 2. Előkészítés a folteltávolítás előtt:

- 1) Csatlakoztassa a fejet a készülékhez.
- 2) Mielőtt steril kesztyűt húz, a kozmetikus tisztítsa meg és fertőtlenítse a kezét (fertőtlenítheti alkohollal).
- 3) Rögzítse a fertőtlenített folteltávolító tűt a fejre.
- 4) Fertőtlenítse alkohollal az eltávolítani kívánt foltot.
- 5) A folt eltávolítására szolgáló eljárás elvégezhető, miután 3 percig érzéstelenítő gyógyszert alkalmaztak a vendég érintett testrészén.

## Ellenjavallatok

1. Terhes nők számára tilos a használata.
2. Szívbetegségben szenvedő betegek esetében tilos a használata.
3. Magas vérnyomású betegeknél tilos a használata.
4. Belső sérülésekkel rendelkező betegeknél tilos a használata.
5. Bőrbetegségben szenvedő betegeknél tilos a használata.
6. Tilos az alkalmazás olyan pácienseknél, akiknek a kezelt testrészén nyílt seb van.

## A 2in1 kozmetikai ultrahang készülék működési mechanizmusa

1. Széles kezelési tartománya, gyors hatása, valamint magas gyógyulási aránya és könnyű kezelhetősége miatt a készülék felkelte a közvélemény figyelmét, és egyre népszerűbbé válik. Funkcióinak három fő szempontja van:

#### (1) Mechanikus funkció

Mechanikai funkciói: lágyítja a szöveteket, növeli a penetrációt, javítja az anyagcserét, serkenti a vérkeringést, élénkíti az idegrendszert és a sejteket.

#### (2) Melegítő funkció

A szuperszonikus melegítő funkció a vérkeringést érinti, lelassítja a sejt gerjesztett pontját, és az erek működésének és anyagcserejének megváltoztatásával segít a fájdalom enyhítésében. A görcsös bőr is ellazulhat, és a göresoldó funkciója is van.

#### (3) Kémiai funkció

A szuperszonikus hullám stimuláló hatású lehet, és felgyorsíthatja az anyagcserét. A pH-érték lúgos irányba történő változását is okozhatja, és segítheti a gyógyszer penetrációját, valamint javíthatja a gyógyszer sterilizálási képességét.

Ultrahang funkció:

2. Napjainkban a mikroszámítógép-vezérelt, érintésvezérlésű azonnali folteltávolítás a legmagasabb szintű kozmetikai technológia. A számítógépes rendszer által előállított nagyfrekvenciás árammal képes azonnal, vérzés és fájdalom nélkül eltávolítani a szeplőket, öregsegi foltokat, lapos anyajegyeket, kinővéseket stb. Orvosi szépítő hatása van, például gyors hatású, biztonságos és nincs mellékhatása. Jellemzői a következők:

- (1) A legújabb technológiát használja, teljesen számítógép-vezérelt, így biztonságos, kényelmes és gyors.
- (2) 10 fokozatban állítható teljesítményt biztosít a folt eltávolításához, amely rugalmas és megbízható kezelést tesz lehetővé.
- (3) Az egyedülálló 4HZ szinuszhullám impulzusmodulációval többféle kezelési módszert biztosít.

## Gyógyító és szépészeti kezelések a 2in1 kozmetikai készülékkel

### 1. A készülék kozmetikai hatása

#### (1) Megpuhítja a trombuszt és eltávolítja a vörös kiütéseket;

Szuperszonikus impulzussal és a vérkeringést aktiváló kenőccsel együtt helyreállítja a deformálódott hajszálereket. A vörös kiütés ennek megfelelően eltávolításra kerül.

#### (2) Eltávolítja a kiütéseket vagy hegeket:

Mivel szuperszonikus képes behatolni a bőrbe, javítja a vérkeringést és az anyagcserét is, így gyorsan eltávolítja a színes foltokat. A szuperszonikus funkciót a kiütés elleni kenőccsel együtt ajánlott alkalmazni, általában 10 alkalommal, ismételt kezelésként kétnaponta..

#### (3) Megszünteti a rendellenes bőrpigmentációt:

A szuperszonikus funkció használata kevés hagyományos kínai gyógyító arckrémrel és nagy dózisu C-vitaminnal együtt pozitív hatással lehet a pigment eltávolítására. A hatása 3 kezelés után jelentkezik, és a teljes eltávolítás 10-40 kezelés után következik be.

#### (4) A pigment- és hipodermikus foltok eltávolítása:

A szuperszonikus funkció használatával roncsolja a folt sejtmembránját, és megakadályozza, hogy alakot képezzen, ezáltal eltávolítja a pigmentet és alaposan eltünteti a foltot az anyagcsere-funkcióval együtt. A kezelési ciklus szerint 10 alkalommal kezelési időszakonként, és a következő kezelés előtt tartson egy hét szünetet.

#### (5) Eltávolítja a ráncokat és a véraláfutásokat, valamint megemeli a bőrt:

A szuperszonikus funkció masszázsfunkciójának mechanizmusát használva egyrészt szabályozza a hipodermális sejtmembrán változását, másrészt javítja a vérkeringést és az anyagcserét. Ily módon eltávolíthatók az enyhe ráncok, valamint a vérrögök vagy a kemény tárgytól megsérült zselózis.

#### (6) Eltávolítja a szemtáskákat és a sötét karikákat:

A szuperszonikus funkció masszázsmechanizmusának használatával felgyorsítja a vér- és nyirokkeringést, a melegítő funkcióval együtt feloldja a zsírt és javítja a hipodermikus felszívódást, ezáltal csökkenti a felhalmozódott vizet és a zsírt, és végül megszünteti a sötét karikákat és a szemtáskákat. A szondával finoman masszírozzon minden szemtáskát 5 percig a bőr textúrájának irányában. Ne érintse a szemet közvetlenül a szondával.

(7) Lágýítja a zselózist és eltávolítja a pattanásokat:

A szuperszonikus funkciót a pattanásos kenőccsel együtt használva masszírozza az érintett területeket közel egy percig, ez megakadályozza a hegesedést, miközben a pattanások gyógyulnak..

(8) Kezeli a szklerózist és a kígyóbórt:

Szuperszonikus funkció használata glicerinnel, folyékony gombaölő szerrel vagy modern kenőanyaggal együtt a tünetek javítására.


(9) Gyakori masszírozással javítja a bőrfelületet:

A szuperszonikus funkció segítségével gyorsan eltávolítja a foltokat vagy a pattanásokat, és javítja a bőr kortinját..

(10) Megszünteti a granulációt

A túlyuk enyhén érintkezik a granuláció gyökerével, és lézeres elektromos akupunktúrával elégeti a gyökérsejtet. A granuláció körülbelül egy hét múlva eltűnik.

## Útmutató a 2in1 ultrahangos kozmetikai készülék vezérlőpaneljéhez

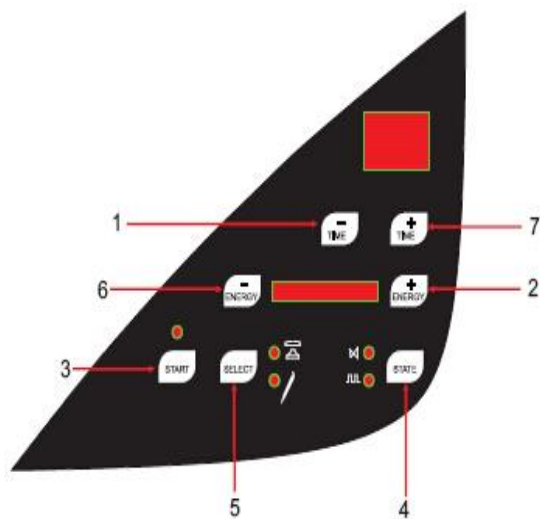

1. Idő mínusz ( TIME - )

7. Idő plusz ( TIME + )

6. Energia mínusz ( ENERGY - )

2. Energia plusz ( ENERGY + )


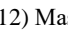
3. Start /stop (START)

4. Hullámforma mód kiválasztása ( STATE)

5. Üzem mód választás (SELECT)

## Útmutató a 2in1 ultrahangos kozmetikai készülék vezérlőpaneljéhez

### 1. A szuperszonikus funkcióra vonatkozó eljárások

- 1) Tisztítsa meg az arcbórt megfelelő arctisztítóval;
- 2) Az arctisztító használata után gőzölje 10 percig az arcát a arcgőzölő készülékkel;
- 3) Alaposan távolítsa el a pattanásokat, mitesszereket stb.
- 4) Kenje be az arcát megfelelő arcápolóval;
- 5) Óvatosan törölje le a krémet;
- 6) Válassza ki a megfelelő bőrápolót a bőr jellegének és a megoldandó problémáknak megfelelően;
- 7) Vigye fel a kiválasztott bőrápolót egyenletesen az arcra;
- 8) Kapcsolja be és válassza ki a megfelelő kimeneti csatlakozót, és csatlakoztassa az ultrahangos szondát;
- 9) Nyomja meg a START gombot, és állítsa be az energia mértékét az ENERGY -vel;
- 10) Állítsa be a megfelelő időt (TIMER), ami általában 15 perc;
- 11) Ultrahangos üzemmód és hullámforma kiválasztása (STATE)—“ Folyamatos hullám ” (  ) vagy “ impulzushullám ” (  ) az igénynek megfelelően;
- 12) Masszírozza a bőrt, ahol a krémet a szondával felvitte.;
- 13) Tisztítsa meg a szondát a művelet befejezése után;
- 14) A bőr felfrissül és kellemes lesz, ha a megfelelő hagyományos kínai orvoslást alkalmazunk.

### 2. Folteltávolítási eljárás

- 1) Csatlakoztassa a megfelelő fogantyút a folt eltávolításához, kapcsolja be és válassza ki a megfelelő tűt.;
- 2) Válassza ki a folteltávolítási módot a SELECT gomb segítségével.;
- 3) Állítsa az ENERGY értéket min értékre;
- 4) Ellenőrizze, hogy van-e áram a fémrész ellenőrzésével;
- 5) Határozza meg az áramtartományt a kezelt folt méretétől függően. Állítsa be az áramot a gyengétől az erősig, és állítsa be a tartományt a vendéggel való egyeztetés után.;
- 6) Az áramnak elfogadhatónak kell lennie. A túl erős áram égéshez vezet, a túl gyenge pedig befolyásolja a hatást és az időt. Folteltávolítás: mozgassa a tűt előre-hátra úgy, hogy a tű enyhén érintse a foltot. Könnyen tapasztalhatja, hogy a melanin a tű mozgatása után megég és eltűnik. Egyszerre is eltávolítható, ha a folt sekély, kis területű; ha azonban a folt mély és nagyobb területű, jobb két vagy három alkalommal eltávolítani. Ezenkívül a vendég mozdulatlan maradjon, a kozmetológus figyeljen arra, hogy a keze kiegyensúlyozott legyen, hogy ne remegjen, hogy elkerülje a művelet során okozott égési sérüléseket, amely a sebgyógyuláshoz vezethet, és hogy ne alakuljon ki heg. Felületi anyajegy: A művelet során különös figyelmet kell fordítani az anyajegyek mélységének megkülönböztetésére. Az anyajegyek esetében, amelyek a gyökérknél a bőr alatti szövetek alatt nőnek, jobb, ha nem vágjuk le egyszerre túlvast az anyajegy bőrretegét, hanem kis lépésekben etejtjük. A meglehetősen mélyre növe anyajegy eltávolítása után a gyulladás elkerülése mellett a legjobb, ha a seb gyógyulásáig, 23 napig tápláló krémet alkalmazunk a sejtek aktiválására, hogy megelőzzük a bőr hegesedését. Azonban nem szabad tápláló krémet alkalmazni a gyulladt bőrre..

## **A granuláció eltávolítása**

Finoman érintse meg a granuláció gyökerét a tű hegyével, és égesse el a gyökérsejtet lézeres elektromos akupunktúrával. A szemcsék körülbelül egy hét múlva eltűnnek. A granuláció kiégetése is lehetséges rádió-akkuszométerrel. Ebben az esetben a granuláció mérete nem lehet túl nagy, különben többször kell kiégetni, hogy ne befolyásolja a sebgyógyulást.

## **Tetoválás eltávolítása:**

Általában célszerű a 3-as tűt használni a tetoválás eltávolításához, ha nagy a tetovált terület. A módszer nagyjából megegyezik a folt eltávolításának módszerével. Az egyetlen különbség a szükséges idő, és a művelet folyamatossága. A túl nagy felületű (3 cm-nél nagyobb) tetoválások esetében a tetoválást több menetben kell eltávolítani, nem pedig egyszerre. Ellenkező esetben beláthatatlanok lehetnek a következmények, ha bakteriális fertőzés miatt gyulladás lép fel. Ezért mind a kozmetikus, mind a vendég részéről óvatosságra van szükség. Ha súlyos gyulladás lép fel, a lehető leghamarabb kezelni kell.