

Figyelmeztetés

1. Mozcgatás során óvatosan emelje fel és tegye le a készüléket; meghibásodás esetén kérjük, ne ütögesse erősen, hogy elkerülje az ütés okozta meghibásodást.
2. A készüléket mozgatása során vízszintesen kell tartani a rezgések és ütések elkerülése érdekében.
3. Ne nyomja össze a készüléket, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat a készülékház deformálódásának, sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében.
4. A megfelelő üzemi áramforrást a műszer testen található jelöléseknek megfelelően kell kiválasztani.
5. Ezt az eszközt nem szabad a fürdőszobában használni.
6. A villámcsapás elkerülése érdekében villámláskor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót.
7. A készülék testébe nem szabad folyadékot fecskendezni, hogy elkerülhető legyen a készülék rövidzárlat miatti károsodása.
8. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, ki kell húzni a hálózati dugót a konnektorból.

Műszaki paraméterek

1. Működési feszültség: AC 220V--AC 240V
2. A készülék maximális teljesítménye: 25W
3. Csomagolási méret: 26,5*14*22,5 (D*Š*V) cm

Nagyfrekvenciás kozmetikai eszköz Felhasználói kézikönyv



Kedves Ügyfeleink!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, használat előtt olvassa át ezt a kézikönyvet, hogy biztosítsa a készülék maximális teljesítményét és a használat biztonságát. Kérjük, tárolja megfelelően a későbbi használatig.

Funkció

A nagyfrekvenciás, érintőképernyővel és mikroszámítógéppel felszerelt kozmetikai készülék egy csúcskategóriás kozmetikai berendezés, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:


1. Használja ki az ultraibolya sugárzást a bőr besugárzására, hogy sterilizálja azt és felgyorsítsa a gyógyulást.
2. Szabaduljon meg a foltoktól, pigmentációtól és pattanásoktól.

Jellemzők

1. Egyszerű és gyors működés a legújabb mikroszámítógépes technológiával
2. Intelligens és megbízható beavatkozás 10 állítható szint segítségével
3. Különböző, impulzushullámmal történő módszerek állnak rendelkezésre

A kezelőpanel leírása

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| ① Időcsökkentés | ② Energiacsökkentés |
| ③ ON/OFF | ④ Az idő növelése |
| ⑤ Energia növelése | ⑥ Készenléti állapotjelző |
| ⑦ Bekapcsolás jelző | ⑧ Idő kijelző |

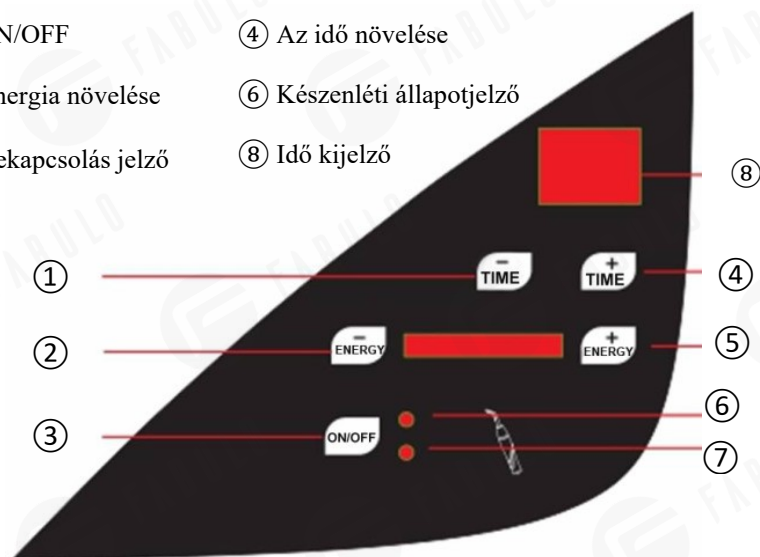

Használat

1. Helyezze az elektródát a kézi egységbe, és jól fogja meg.
2. Csatlakoztassa, és hallani fog egy "sípoló hangot" elindulásnál, megjelenik a ⑧. 30 (perc) után; ha az energia nulla, a ⑥ jelző piros lesz, a készülék készenléti üzemmódba lép.
3. A ③ gomb megnyomásakor a ⑥ jelző zöldre vált, a ⑧ második pontja villog, és a készülék elindul.
4. Növelje/csökkentse az energiát 10-es fokozatban a ⑤ / ② gombok megnyomásával.
5. Elektromosság tesztelése fém érintésével.
6. Az energia nem lehet túl magas, hogy elkerüljük az esetleges sérüléseket, sem túl alacsony ahhoz, hogy a kezelés kimenetelét rontsa.
7. A kisebb foltok már egy kezelés után eltávolíthatók, a nagyobbakhoz 2-3 beavatkozás szükséges.

Megjegyzés

1. Ha a kozmetikus a kezelést sterilizált kesztyűben végzi, a kezét először meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell alkohollal.
2. Az elektródákat sterilizálni kell, és tisztán és szárazon kell tartani.
3. A kezelés előtt az ügyfél kezelt testrészét alkohollal fertőtlenítsse.
4. Ezt a részt 3 percig dörzsölje be érzéstelenítővel, majd kezdje meg a kezelést.
5. A kezelés során ne maradjon túl sokáig a kezelt területen, hogy elkerülje a hegeseést.
6. A használat előtt vegyen le minden fém tárgyat (fülbetét, nyaklánc stb.).