

Használati útmutató


UV eszközfertőtlenítő

Termékjellemzők

ÁRAMELLÁTÁS	VÁLTÓÁRAM (220-240V/50Hz) ☐ (110-120V/60Hz) ☐	
TELJESÍTMÉNY	6W	
MÉRETEK	Külső méretek 34×21×24cm	Belső méretek 26×19×17cm

Az egyes részek leírása

- A termék egyes részeinek megnevezése az ábrán látható módon:

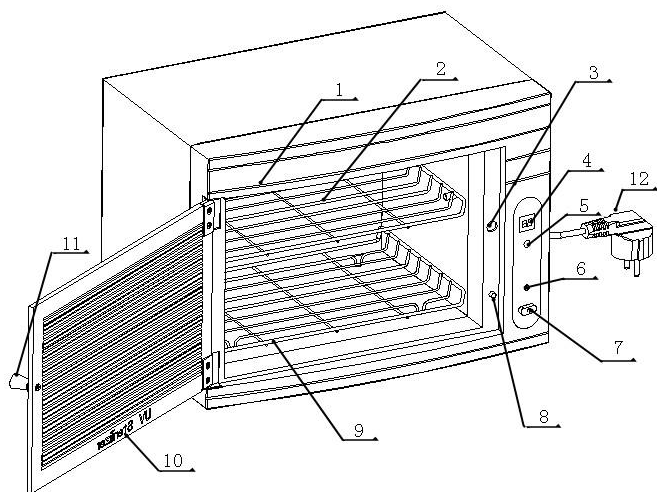

1. UV lámpa

2. Polc

3. Mágnes

4. LED kijelző

5. Start gomb	6. Áramindikátor	7. Hálózati kapcsoló
8. Mikrokapcsoló	9. Polc	10. Akrilát ajtó
11. Ajtónyitó	12. Tápkábel	

YM-9002 A termék jellemzői

★ Vadonatúj ózonkészülék, sterilizálás ultraibolya sugárzással - Nem károsítja az eszközöket, biztonságos, nincs szükség fertőtlenítő szerekre a hatékony sterilizáláshoz.

★ Modern luxus kivitel – mikro komputerrel történő vezérlőpanelel működtetés, LED időkijelzés, 30 perc, 60 perc, 90 perc - különféle időtartamú üzemmódok, energiatakarékos, biztonságos és kényelmes használatot biztosít.

★ Személyre szabott tervezés - Speciális ajtóvédelem kapcsolóval - az UV lámpa bekapcsol, ha az ajtó be van csukva, és kikapcsol az ajtó kinyitásakor, hogy megvédje a felhasználót az UV-sugárzástól. °

★ Minőségi alapanyagok — erős mágneses ajtó, magas fényű rozsdamentes acél tartály, fém polc. °

Termékfunkciók

▲ Használja ezt a vadonatúj ózonos, ultraibolya sugárzással működő készüléket a baktériumok elpusztításához a különböző eszközökről.

Bevezető

- ① Használat előtt olvassa el ezt a termékleírást.
- ② A termékek használata, figyelmeztetések és karbantartás.

Használati útmutató

1. Helyezze a sterilizálót stabil felületre.
2. Tegye a sterilizálni kívánt eszközöket a polcra, majd zárja be az ajtót.
3. Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék adataival, majd csatlakoztassa a hálózathoz.
4. Nyomja meg a főkapcsolót, a jelzőfény és a LED kijelző bekapcsol, és a készülék „sípoló” hangot ad ki.
5. Nyomja meg a SET gombot, a LED kijelző 30 perces időzítést mutat. Ezután nyomja meg a SET gombot másodszor, a LED kijelző 60 perces időzítésre kapcsol. Nyomja meg a SET gombot harmadszor, a LED kijelző 90 perces időzítésre kapcsol.
6. Ha újra be szeretné kapcsolni a készüléket, egyszerűen nyomja meg a SET gombot, majd ismételje meg a fenti lépéseket.

Karbantartási útmutató

- Semleges tisztítószerrel használjon a készülék rendszeres tisztításához; a savas, lúgos, maró vagy mérgező tisztítószerek használata szigorúan tilos.
- Kapcsolja ki az áramellátást, amikor befejezi a készülék használatát, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, ha sokáig nem használja, vagy mielőtt a készüléket áthelyezi vagy tisztítja.
- A sterilizálót száraz helyen kell elhelyezni.
- A készülék meghibásodása esetén forduljon szakemberhez, aki alaposan leellenőrzi a készüléket.

Biztonsági figyelmeztetések

◆ A szimbólumok jelentése

 Veszély, figyelmeztetés, figyeljen erre.

 Tilos

 Bizonyos problémákat okoz, ha nem az előírt módszer szerint működik.

▲ Figyelmeztetések használat előtt

 Figyelmeztetés			
	Gyermekek nem használhatják ezt a terméket.		A sterilizáló használata előtt ellenőrizze, hogy a műszerek szárazak-e .
	Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.		A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja .
	Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e a sterilizáléhoz, egyéb feszültség használata tilos.		Más feszültség használata tüzet és áramütést okozhat.
	Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelően földelt-e.		A balesetek elkerülése érdekében tilos megosztani vagy kombinálni más eszközökkel.

	A készüléket ne használja párás környezet közelében. Megakadályozhatja a tüzet és áramütést.		Használat előtt, az áramütés elkerülése érdekében, ellenőrizze, hogy a sterilizáló belseje száraz-e.
	Ne nyúljon a termékhez nedves kézzel, a készülék használata előtt szárítsa meg kezét, különben áramütést okozhat.		Ha a külső tápkábel burkolata megsérült, a tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
	Szállítás után ellenőrizze a termék állapotát, a balesetek elkerülése érdekében.		Ha a készülék belsejében gázszivárgás lép fel, ne érintse meg a főkapcsolót és a Start gombot.
	Ne kísérelje meg a készüléket sajátkezűleg megjavítani.		Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség stabil-e. Instabil körülmények között tilos használni a készüléket.

▲ Figyelmeztetések használat közben:

 Veszély			
	A működésben lévő sterilizálót gyermekektől távol kell tartani.		Tartsa távol víztől és nedves környezettől, hogy megakadályozza a tüzet és az áramütést.

⚠ Figyelmeztetés			
	A készüléket egyenletes felületű munkalapra állítva használja.		Ha zavaró tényező lép fel, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
	A készülék használata instabil körülmények között tilos, a károsodás vagy balesetek elkerülése érdekében azonnal hagyja abba a használatát.		Ha úgy találja, hogy a sterilizáló nem működik megfelelően, kapcsolja ki, küldje szervizbe, és addig ne használja, amíg meg nem javították.
	Ha a sterilizáló működik, és szivárgás lép fel, kapcsolja ki és azonnal húzza ki a konnektorból.		A készüléket ittas vagy eszméletlen személyektől megfelelő távolságban működtesse.

▲ Figyelmeztetések használat után:

⚠ Figyelmeztetés			
	Ha a sterilizáló nem működik megfelelően, azonnal kapcsolja ki, a balesetek elkerülése érdekében használata tilos, amíg meg nem javítják.		Ne engedje, hogy illetéktelen személyek javítsák a készüléket, ha az nem működik megfelelően.
⚠ Figyelmeztetés			
	Húzza ki a tápkábelt, ha a fertőtlenítőt sokáig nem használja.		Csomagolja be és tárolja megfelelően a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

	A sterilizálót használat után száraz helyen kell elhelyezni.		Használat után tartsa gyermekektől elzárva.
	Ne tisztítsa a készüléket vízzel azonnal a használat után.		A készülék nem lehet túl sokáig áram nélkül.

Forgalmazó: iM3, s.r.o.

Kistejedi u. 515/8
92901 Dunaszerdahely
www.fabulo.hu