

YAKIMASPORT

COLD BANDAGE

Felhasználói útmutató

1. Nyissa ki a csomagot, és vegye ki a nedves borogatást.
2. Tekerje át a kötést az érintett terület körül úgy, hogy szorosan illeszkedjen, de ugyanakkor ne gyakoroljon túl nagy nyomást az érintett területre. A borogatást ne tekerje fel túl vastag rétegben a hűtőfolyadék elpárolgásának megakadályozására.
3. Rögzítse a kötés végét úgy, hogy az ne oldódjon ki.
4. Az érintett terület 10-15 percen belül lehűl, és 2 órán át hideg marad.
5. Javasoljuk, hogy 15 percenként ellenőrizze a hűtött testrészt. Ha az érintett terület túlzott lehűlése miatt vörösség vagy egyéb reakció lép fel, hagyja abba a termék használatát.

Összetétel: Poliamid, poliészter, latex gumi, víz, etanol, menta, borneol

Figyelem:

1. Kizárólag külső használatra szánt termék.
2. Ha a hatóanyag a szemébe kerül, ne törölje le, mossa ki a szemét csapvízzel, és ha szükséges, forduljon orvoshoz.
3. Gyermekektől elzárva tárolandó.
4. Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett jóállási határidőn túl.
5. A termék latexet tartalmaz. A terméket latexre allergiás személyek nem használhatják.

25°C alatti hőmérsékleten tárolja.

Forgalmazó:

iM3,s.r.o., Kistejedi u. 515/8, Dunaszerdahely, www.fabulo.hu